

器具機械49 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器 一般医療機器
歯科用マンドレル JMDNコード:35170000

ソフトポル・ビッグマン

【形状・構造等】



頭部径8.0mm、長さ45.0mm
軸径 2.35mm

材質: ステンレス

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社
ホームページ <http://www.dentalaid.co.jp>

製造業者 EVE Ernst Vetter GmbH (ドイツ)

【使用目的または効果】

歯科技工用のマンドレルで、円盤状の各種歯科用研削材を装着して使用する。

【使用方法等】

円盤状の歯科用研削材を装着し、歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、被研削物にゆっくりと押し付けて、研削、研磨します。

【使用上の注意】

- ① チャックの奥まで確実に装着し、最高使用回転数(6,000rpm)以下で使用する。最高使用回転数を超えた場合には、破折してけがをする恐れがあるので、使用回転数を厳守すること。
- ② 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- ③ 形状が大きなものや、バランスの悪い研削材を使用すると、折れ曲がったりすることがあるので、無理な角度、過剰の加圧での使用は避けること。
- ④ 本材を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。