

歯科材料09 歯科用研削材料 一般医療機器
歯科用ゴム製研磨材 JMDNコード: 70903000


テクノポリッシャー

【形状・構造及び原理等】

- 成分
シリコン、酸化アルミニウム
- 形状
円盤状、ナイフエッジ型円盤状
径22mm×厚3mm

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社
ホームページ <http://www.dentalaid.co.jp>

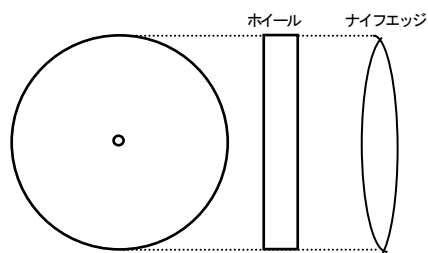

【使用目的又は効果】

歯科技工用の研削材で、歯科用金属やレジン等の形態修正や研磨等に用いる。

用 途	カラー	型 番	
		ホイール	ナイフエッジ
貴金属合金・硬質金属の中荒研磨用	ブラック	1W	1N
貴金属合金・硬質金属の中研磨用	ブラウン	2W	2N
貴金属合金・硬質金属の細研磨用	ライトグリーン	3W	3N
セラミック・貴金属合金・硬質金属の中研磨用	ホワイト	6W	6N
セラミック・貴金属合金の細研磨用	パープル	7W	7N
貴金属合金、チタン合金の中研磨用	モスグリーン	9W	9N

【使用方法等】

歯科技工用マンドレルに取り付け、歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、被研削物にゆっくりと押し付けて、研削、研磨します。

【使用上の注意】

- 使用注意
 - 十分な強度のあるマンドレルに確実に装着し、最高使用回転数(20,000rpm)以下で使用する。最高使用回転数を超えた場合には、破折してけがをする恐れがあるので、使用回転数を厳守すること。
 - 使用前に予備回転を行い、振れがない事を確認すること。
 - 頭部形状が大きなものは、折れ曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用はさけること。
 - 本材を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。