

歯科材料09 歯科用研削材料 一般医療機器
歯科用ゴム製研磨材 JMDNコード: 70903000

ペンポイント

【形状・構造等】

- 1) 成分
シリコン
- 2) 形状
円筒状
径3. 0mm×長さ20. 0mm

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社
ホームページ <http://www.dentalaid.co.jp>

製造業者 EVE Ernst Vetter GmbH (ドイツ)



【性能、使用目的、効能または効果】

歯科技工用の研削材で、歯科用金属やレジン等の形態修正や研磨等に用いる。

用 途	カラー	型番
貴金属合金、レジンの研磨用	ブラック	1P
貴金属合金、レジンの中研磨用	ブラウン	2P

【操作方法または使用方法等】

専用マンドレル「ペンポイントアダプター」に取り付け、歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、被研削物にゆっくりと押し付けて、研削、研磨します。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ① 専用マンドレル「ペンポイントアダプター」に確実に装着し、最高使用回転数(20, 000rpm)以下で使用する。最高使用回転数を超えた場合には、破折してけがをする恐れがあるので、使用回転数を厳守すること。
 - ② 使用前に予備回転を行い、振れがない事を確認すること。
 - ③ 無理な角度、過度の加圧での使用はさけること。
 - ④ 本材を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。