

ペンポイントアダプター

【形状・構造等】

- 1) 成分
ステンレス
- 2) 形状

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社
ホームページ <http://www.dentalaid.co.jp>

製造業者 EVE Ernst Vetter GmbH (ドイツ)



頭部径5.0mm、長さ51.0mm

軸径 2.35mm

【性能、使用目的、効能または効果】

歯科用研削材ペンポイント専用のマンドレルで、ペンポイントを装着して使用する。

【操作方法または使用方法等】

歯科用研削材ペンポイントを装着し、歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、被研削物にゆっくりと押し付けて、研削、研磨します。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ① チャックの奥まで確実に装着し、最高使用回転数(20,000rpm)以下で使用する。最高使用回転数を超えた場合には、破折してけがをする恐れがあるので、使用回転数を厳守すること。
- ② 使用前に予備回転を行い、振れがない事を確認すること。
- ③ 折れ曲がったりすることがあるので、無理な角度、過る度の加圧での使用はさけること。
- ④ 本材を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。
- ⑤ 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。