

ロビンソンブラシ

【形状・構造等】

- 1) 成分
豚毛、ステンレス
- 2) 形状
円盤状

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社
ホームページ <http://www.dentalaid.co.jp>



型番	径
#11S	18mm
#9S	15mm
ミニ	10mm

軸径 2.35mm

【性能、使用目的、効能または効果】

歯科技工用の研削材で、歯科用金属やレジン等の形態修正や研磨等に用いる。

【操作方法または使用方法等】

歯科技工用マンドレルに取り付け、歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、被研削物にゆっくりと押し付けて、研削、研磨します。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ① チヤックの奥まで確実に装着し、最高使用回転数(10,000rpm)以下で使用すること。最高使用回転数を超えた場合には、破折してけがをする恐れがあるので、使用回転数を厳守すること。
 - ② 使用前に予備回転を行い、振れがない事を確認すること。
 - ③ 無理な角度、過度の加圧での使用はさけること。
 - ④ 本材を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。
 - ⑤ 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。