

歯科材料09 歯科用研削材料 一般医療機器
歯科用研磨器材 JMDN70907000

ホワイトルージュ

【形状・構造及び原理等】

1) 形状

直方体(125mm×45mm×30mm)

2) 成分

酸化アルミナ、脂肪酸、乳化剤

【使用目的又は効果】

歯科技工用の研磨材で、歯科補綴物等(金属、レジン)の研磨に用いる。

【使用方法等】

歯科技工用レーズバフまたはエンジン用バフ、ブラシ等に付着させ、ソフトタッチに被研削物に押し付けて、研磨します。

【使用上の注意】

- ① 本材を付着させるバフ、ブラシ等の使用回転数を厳守すること。
- ② 使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ③ 防塵マスクを使用し、粉塵を吸入しないようにすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社
ホームページ <http://www.dentalaid.co.jp>