

ボックストリマー

【形状・構造等】

1) 構造

幅 35cm × 奥行 45cm × 高さ 50cm

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社

ホームページ <http://www.dentalaid.co.jp>

ディスクの規格

外径 230mm × 穴径 22mm(モデルⅡ以降)

外径 250mm × 穴径 25mm(モデルⅠ)



【使用目的または効果】

歯科用石膏、埋没材の乾式研削に用いる。

【使用方法等】

吸塵器を接続し、ディスク部分を回転させて、被研削物を押し付けて研削します。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ① 使用前に予備回転を行い、異常な振動やカバー等に接触のない事を確認すること。
- ② 無理な角度、過度の加圧での使用はさけること。
- ③ 必ず、吸塵器を接続・稼働させて使用すること。