

歯科材料09 歯科用研削材料 一般医療機器
歯科用ゴム製研磨材 JMDNコード:70903000

KENDA クイーンポリッシャー

【形状・構造等】

- 1) 成分
酸化アルミナ、シリコン、ステンレス(軸)
- 2) 形状
径 9.5mm×長さ約 24mm
軸径 2.35mm



- 3) 色調
グレー

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社
ホームページ <http://www.dentalaid.co.jp>

【性能、使用目的、効能または効果】

歯科技工用の研削材で、歯科用金属やレジン等の形態修正や研磨等に用いる。

【操作方法または使用方法等】

歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、被研削物にゆっくりと押し付けて、研削、研磨します。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ① 最高使用回転数(10,000rpm)以下で使用する。最高使用回転数を超えた場合には、破折してけがをする恐れがあるので、使用回転数を厳守すること。
 - ② 使用前に予備回転を行い、振れがない事を確認すること。
 - ③ 折れ曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用はさけること。
 - ④ 本材を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。