

2021 年 5 月改訂(新様式第 3 版)
2017 年 10 月改訂(新様式第 2 版)
2014 年 2 月作成(第 1 版)


医療機器届出番号:28B3X00040000041

歯科材料09 歯科用研削材料 一般医療機器
歯科用研磨器材 JMDNコード:70907000

エイド ポリディスク

【形状・構造等】

- 1) 成分
ポリエステル、酸化アルミニウム(粒度 80 μm)、
ポリウレタン樹脂、ステンレス(軸)
- 2) 形状
直径 25mm×厚さ 0.3mm、軸径 2.35mm

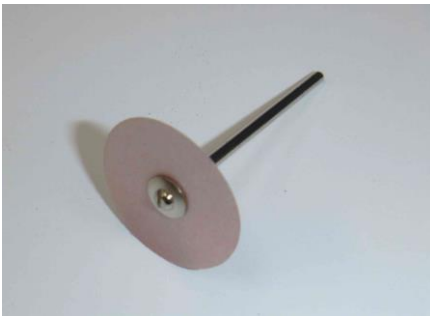

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社
ホームページ <http://www.dentalaid.co.jp>

【使用目的または効果】

歯科技工用の研削材で、主にレジン床や硬質レジン等の形態修正に用いる。片面のみに研磨材が付いており、研削の際、隣接の金属や陶歯に影響を与えない。

【使用方法等】

歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、被研削物にゆっくりと押し付けて、研削、研磨します。
回転速度が速すぎる場合、摩擦熱で焼き付きを起こす場合があります。被研削物に合った適度の回転速度でご使用ください。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ① 最高使用回転数(10,000rpm)以下で使用する。最高使用回転数を超えた場合には、破折してけがをする恐れがあるので、使用回転数を厳守すること。
 - ② 使用前に予備回転を行い、振れがない事を確認すること。
 - ③ 本材を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。