

器具器械 60 歯科用エンジン 一般医療機器
歯科技工用高速レーズ JMDNコード:70740000

デムコ 高速レーズ

【形状・構造等】

1) 構造

外形寸法:幅26cm×奥行32cm×高さ28cm
重量:13.6kg
定格電源:110~115V 50/60Hz
定格回転数:3,450/2,850rpm
消費電力:391W



モデル E96LED

- ⑥ 必ず、吸塵器を接続・稼働させて使用すること。
- ⑦ 本機器を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを着用すること。
- ⑧ 使用後は必ずメインスイッチを切り、長時間使用しない場合には、電源プラグを抜くこと。
- ⑨ 修理は専門家にまかせること。
- ⑩ 機器の形態変更や改造、分解等はしないこと。

【保守・点検に係る事項】

チャック着脱用の工具は、スピンドルのレバー内に内蔵されている(回すとはずれます)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社
ホームページ <http://www.dentalaid.co.jp>

製造業者: CMP Industries LLC (アメリカ)

【使用目的または効果】

歯科技工用補綴物の研削、研磨、切断。

【使用方法等】

歯科技工用研削材を取り付け、回転させて、歯科技工用補綴物の研削、研磨、切断に用いる。

【使用上の注意】

〈使用注意〉

- ① 使用前に予備回転を行い、異常な振動やカバー等に接触のない事を確認すること。
- ② 【重要】コレットチャックにバーを装着せずに回転させるとブレーキがかかり、モーターが焼結します。必ずバーを装着してください。
- ③ 本機は輸入品で115V 使用機です。必ず付属の昇圧トランスを接続し使用すること。
- ④ 無理な角度、過度の加圧での使用はさけること。
- ⑤ コンセントプラグは、必ず付属のプラグ(3穴用→2穴用アース付)を使用し、アースを正しく接続すること。