

歯科材料09 歯科用研削材料 一般医療機器
歯科技工用アブレイブ研削器具 JMDNコード: 70901000

楽々ジスク

【形状・構造等】

1) 成分

ガラスクロス、シリコンカーバイド、
フェノール樹脂系硬化剤、無機顔料

2) 構造

円盤状グラスファイバー表面にシリコンカーバイドを接着。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社

ホームページ <http://www.dentalaid.co.jp>

販売(問い合わせ先)

内外歯材株式会社

電話番号 06-6771-5553

FAX番号 06-6779-7845

① ディスクの規格

種 類	規 格
シロクス用	外径 230mm×穴径 22mm
モリタ用	外径 230mm×穴径 19mm
ヨシダ用	外径 230mm×穴径 19mm

② 目の粗さ

種 類	カラー
標準	黒色。サイドを緑色に着色
荒	黒色

【性能、使用目的、効能または効果】

歯科用石膏、埋没材の研削に用いる。

【操作方法または使用方法等】

歯科用モデルトリマーに装着し、回転させて、
被研削物を押し付けて研削します。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ① 機器に確実に装着し、必要に応じてワッシャーも使用すること。
- ② 使用前に予備回転を行い、異常な振動やカバー等に接触のない事を確認すること。
- ③ 各メーカー別に対応しておりますので、取り付け付属品共必ず適応機種用を使用のこと。
- ④ 無理な角度、過度の加圧での使用はさけること。
- ⑤ 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。