

歯科材料09 歯科用研削材料
一般医療機器
歯科用研磨器材
JMDNコード: 70907000

超ソフトバフ

【形状・構造等】

- 1) 成分
フランネル布
- 2) 形状
円盤状
外径80mm×厚さ約1cm
フランネル布 12枚重ね

【性能、使用目的、効能または効果】

歯科技工用の研削材で、歯科補綴物等の研削、研磨に用いる。

【操作方法または使用方法等】

歯科技工用レーズに装着し、研磨砂、研磨ルージュ、研磨ペースト等を付着させ、回転させて、ソフトタッチに被研削物に押し付けて、研削、研磨します。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ① 歯科技工用レーズに確実に装着し、中低速で使用する。最高使用回転数を超えた場合には、破折してけがをする恐れがあるので、使用回転数を厳守すること。
 - ② 使用前に予備回転を行い、振れがない事を確認すること。
 - ③ 無理な角度、過度の加圧での使用はさけること。
 - ④ 本材を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社
<http://www.dentalaid.co.jp>