

2022年6月20日作成(新様式第3版)
2006年3月1日作成(新様式第2版)

医療機器届出番号: 28B3X00040000123

歯科材料09 歯科用研削材料
一般医療機器
歯科用研磨器材
JMDNコード: 70907000

アールピーシー

【形状・構造等】

1) 成分

酸化アルミナ、脂肪酸、乳化剤、顔料

2) 形状

ペースト状

【性能、使用目的、効能または効果】

歯科技工用の研磨材で、歯科補綴物等(金属、レジンのつや出し)の研磨に用いる。

【操作方法または使用方法等】

被研削物に付着させ、回転させた歯科技工用レーズバフに、ソフトタッチに押し付けて研磨します。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ① 本材を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社
<http://www.dentalaid.co.jp>