

LS200 スピンドル

【形状・構造等】



外形:長さ15cm×直径 37mm
プーリー部径約 16mm

【保守・点検に係わる事項】

1. スピンドルにオイルを注油しないでください。故障の原因となります。
2. エアーガンなどで、スピンドルの内部・外部にエアーを強く吹きつけることはしないで下さい。付着している切削粉等が内部に入りベアリングを短命にします。付着した切削粉等は、布・ブラシ等で拭き取ってください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社
ホームページ <http://www.dentalaid.co.jp>

製造業者 SAEYANG MICRO TECH CO.,LTD.(韓国)

【使用目的または効果】

1. 性能
回転数 0～28, 000rpm
2. 使用目的
歯科技工物の研削、研磨

【使用方法等】

電動機付本体に取り付け、歯科技工用回転器具を装着し、回転させて、歯科技工物を研削、研磨する。

【使用上の注意】

1. 使用する回転器具は、メーカーが指定している回転速度以下でご使用ください。
2. 使用する回転器具は ISO 規格のシャンク径をもつ器具をご使用ください。
シャンク径 $\phi 2.35\text{mm}$
シャンク径の細いソバーは、抜けやすく、回転中にとび出しケガをする恐れがあります。
3. 使用する回転器具は、曲がった物、錆びた物は使用しないでください。回転中に破損し、ケガをする恐れがあります。
4. 使用する回転器具は完全に挿入してください。途中で止めて使用することは危険です。回転中に破損し、ケガをする恐れがあります。
5. 【重要】コレットチャックにソバーを装着せずに回転させるとブレーキがかかり、モーターが焼結します。必ずソバーを装着してください。