

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 弾性ストッキング (JMDNコード: 31724000)

「ジョブスト ファローラップ クラシック」の付属品 ライナー

【警告】

<適用対象(患者)>

繊維に対して過敏症のある患者。

[接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため。]

なお、本体のジョブスト ファローラップ クラシックは、下肢の静脈血、リンパ液のうっ帯を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングである。末梢部を最大に中枢に向かい漸次的に圧力を加える機能を有する。

【使用方法等】

1. 装着前(サイズの決定)
 - 1-1 ファローラップに添付されていたライナーと同じサイズのライナーを選択する。
 2. 装着方法
 - 2-1 ファローラップを装着する前に本品を装着する。
 - 2-2 装着後、脚全体をなで、ねじれやたるみがないようになませる。
- ** 2-3 余った部分はレッグピース又はサイピース 大腿用パーツの上に折り返しておく。

【使用上の注意】

<使用注意(次の患者には慎重に適用すること)>

- (1) 患者との意思疎通が困難な場合には患者の状態をよく観察して使用すること。[動脈及び静脈の血行障害又は神経障害等を発症した際に、発見が遅れるおそれがある。]
- (2) 本品の使用により、脚に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及びその他装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止すること。[動脈および静脈の血行障害又は神経障害等を発症するおそれがある。]

<重要な基本的注意>

- (1) 本品は繊維製品のため、次のような場合には破損することがあるので注意すること。
 - ①強く引き伸ばしての装着
 - ②爪が伸びていたり、反っていたりする足への装着
 - ③肌荒れした手や伸びた指の爪での取扱い
 - ④鋭利なものへの接触
 - ⑤指輪、ブレスレットをつけたままでの装着
- (2) 本品をはさみで切るなど加工、修理を行わないこと。
- (3) 軟膏等の薬品や油脂、溶剤等が付着すると繊維が劣化するので付着しないよう注意すること。
- (4) 継続使用後、破損、破れなど生じたら新しいものに交換すること。

【保管方法及び有効期限等】

<保管方法>

高温、多湿、直射日光を避け、室温で保管すること。

*【保守・点検に係る事項】

- (1) 40℃以下のぬるま湯と市販の漂白剤を含まない中性洗剤で洗濯し、洗濯機を使用する場合には、洗濯ネットを使用すること。
- (2) 直射日光を避け陰干しにすること。乾燥機は使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】

<構造図>



※本品はジョブスト ファローラップ クラシックの付属品である。

** 1. ライナーの種類とサイズ

単位: cm

ライナー	製品	サイズ	ライナー周径
ファローライナー (レッグピース用)	XS、S	Sサイズ	15 - 58
	M、L、XL	Lサイズ	52 - 70
テリーライナー (サイピース用)	XS、S	Mサイズ	40 - 70
	M、L、XL	Lサイズ	70 - 120

※本品は、「ジョブスト ファローラップ ストロング(医療機器届出番号 13B1X10103000032)」、ジョブスト ファローラップ ライト(医療機器届出番号 13B1X10103000033)」、もしくは「ジョブスト ファロークイック(医療機器届出番号 13B1X10103000035)」と使用することも可能。

2. 材質

<ライナー>形状により以下のいずれかが付属。

- (1) ファローライナー : ポリアミド、ポリウレタン
- (2) テリーライナー : 綿、ポリウレタン

<原理>

本体のジョブスト ファローラップ クラシックは、弾性素材が装着部に同心性の圧迫力を加えるとともに、末梢部から中枢に向かって圧迫力が漸減する構造になっている。

**【使用目的又は効果】

本品は、フットピース、レッグピース、サイピースと併用し皮膚への接触刺激を軽減する。

(3) 塩素系の漂白剤の使用、柔軟剤の使用、ドライクリーニング、
アイロンがけは生地を傷めるのでしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ・ビーエスエヌ株式会社

電話番号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

外国製造所：ビーエスエヌメディカル エスエイ デ シーブイ
BSN medical,S.A.de C.V.

国名：メキシコ

販売業者：テルモ株式会社

お問い合わせ先：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

(9:00～17:45 土・日・祝日を除く)

