

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 弾性ストッキング (JMDNコード：31724000)

ジョブスト ファローウィック

【警 告】

<適用対象（患者）>

次の患者に使用する際には、特に注意すること。

1. 深部静脈血栓症の患者。[本品を装着すると肺血栓塞栓症を起こすおそれがあるため。]
2. 動脈血行障害、うっ血性心不全及び装着部位に炎症性疾患、化膿性疾患、創傷のある患者(創傷がある患者に使用する場合、ドレッシング材等で被覆してから着用すること)。
[圧迫により症状が悪化するおそれがあるため。]
3. 装着部位に神経障害のある患者。
[血行障害を起こしても認識できないおそれがあるため。]
4. 糖尿病患者。
[無症状の神経障害や血行障害を併発している可能性があり、痛み等の異常を認識できないおそれがあるため。]
5. 繊維に対して過敏症のある患者。
[接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため。]

<使用方法>


医師が必要と認める場合を除き就寝時は着用しないこと。
[臥位になることで静脈還流等に変化が起こり、患者によっては必要以上の圧迫圧がかかるおそれがあるため。]

【禁忌・禁止】

1. 重度の動脈血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の患者。
[圧迫により症状を悪化させる危険性が高いため。]
2. 感染性静脈炎の患者。
[菌血症や敗血症を発生、増悪させるおそれがあるため。]
3. 装着部位に極度の変形を有する患者。
[適正な圧迫圧が得られないため。]

*【形状・構造及び原理等】

<構造図（代表図）>

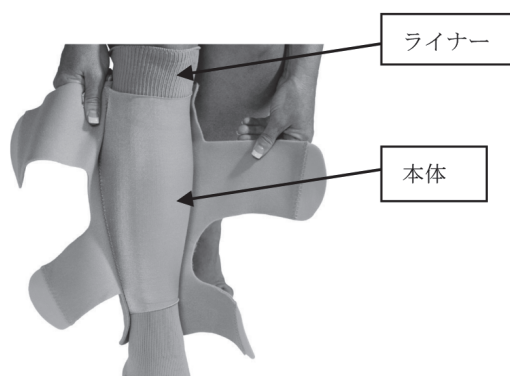

※サイズは、XSからLまで4サイズある。

※本体の全てのベルト状部先端部に固定用の面ファスナーを有する。

1. 規格・寸法

本体種類

単位：cm

サイズ	適用周囲長		適用股長
	足首 (B)	ふくらはぎ (C)	L：足首から膝下部 (D)
XS	17-23	25-38	30-33
S	19-28	32-48	30-33
M	25-37	37-56	30-33
L	29-43	43-67	30-33


※足首部での圧迫圧は30-40mmHg(40-53hPa)

ハイブリッドライナーの種類

■タイプ

標準タイプ：足周径 (A1) 20-27cm

ワイドタイプ：足周径 (A1) 28-35cm

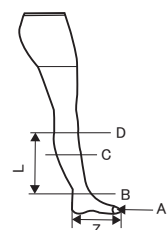

■サイズ

単位：cm

サイズ	足長 (Z)	ふくらはぎ周径 (C)
S	21-24	≤60
M	24-26	≤60
L	26-28	≤60
XL	28-31	≤60

※足先～足首間に20-30mmHgの圧迫圧がかかる。

* ※ハイブリッドライナーの代わりに「ジョブスト ファローウィック クラシック (医療機器届出番号：13B1X10103000031)」の付属品であるライナーを使用することも可能である。

2. 材質

<本体> ポリアミド、ポリウレタン

<面ファスナー> ポリアミド

<ハイブリッドライナー> ポリアミド、ポリウレタン

<原理>

弾性素材が装着部に同心性の圧迫力を加えるとともに、末梢部から中枢に向かって圧迫力が漸減する構造になっている。

【使用目的又は効果】

本品は下肢の静脈血、リンパ液のうっ帯を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングである。末梢部を最大に中枢に向かい漸減的に圧力を加える機能を有する。

【使用方法等】

1. 装着前（サイズの決定）

各測定箇所の周径を全て計測し、適正なサイズを選択する。

注意：サイズが2サイズにまたがる場合、基本的に大きいサイズを選択する。

2. 装着方法

(1) ハイブリッドライナー(以下、ライナー)を装着する。

- (2) 本品の上下に注意し、袋状になっている部分に足を入れる。
- (3) つま先に近い方から順に本体のベルト状部を引っ張り、面ファスナーで固定する。
- (4) 装着後、脚全体をなで、ねじれやたるみがないようになじませる。
- (5) 膝側にライナーがはみ出した場合は、本体側に折り返す。

****【使用上の注意】**

＜使用注意（次の患者には慎重に適用すること）＞

1. 患者との意思疎通が困難な場合には患者の状態をよく観察して使用すること。〔動脈及び静脈の血行障害又は神経障害等を発症した際に、発見が遅れるおそれがある。〕
2. ギプス、外傷等により装着部位が長時間不動状態にある患者には、注意して使用すること。〔潜在的に深部静脈血栓症を発症している可能性がある。〕
3. 本品の使用により、脚に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及びその他装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止すること。
〔動脈及び静脈の血行障害又は神経障害等を発症するおそれがある。〕

＜重要な基本的注意＞

1. 正しい圧迫圧を得るため、装着部位の規定箇所を必ず計測し、正しいサイズの本品を選択する。またサイズ適応外の場合には使用しないこと。
 2. 圧迫圧の過不足を防ぐため、たるみやしわのないように装着すること。本品が、装着中にたるんだり、しわが寄ったり、ずり落ちたり、誤った位置に装着されている場合には正しく装着しなおすこと。
〔適正な圧迫圧が得られず、また血行障害や神経障害及び圧迫性潰瘍を引き起こすおそれがあるため。〕
 3. 腫脹の軽減等により装着中に各部位の周径が変わった場合は、適切なサイズに変更すること。
 4. 本品に、破損（ほつれ、破れ等）がないことを確認してから装着すること。破損がある場合は適正な圧迫圧が得られないため使用しないこと。
 5. 本品は繊維製品のため、次のような場合には破損することがあるので注意すること。
 - (1) 強く引き伸ばしての装着
 - (2) 爪が伸びていたり、反っていたりする足への装着
 - (3) 肌荒れした手や伸びた指の爪での取扱い
 - (4) 鋭利なものへの接触
 - (5) 指輪、ブレスレットをつけたままでの装着
 6. 本品をはさみで切るなど加工、修理を行わないこと。
 7. 本品は圧迫療法に精通した術者が、必ず装着者に使用方法を説明し、正しい装着手順で使用を開始すること。
また患者との意思疎通が困難な場合には、看護、介護介添する者に使用方法を説明すること。
 8. 軟膏等の薬品や油脂、溶剤等が付着すると繊維が劣化するので付着しないよう注意すること。
 9. ライナーは、継続使用後、破損、破れなど生じたら新しいものに交換すること。
- * 10. 他の製品と組み合わせて併用する場合は、生地を重ね、圧迫圧に十分注意して使用すること。
〔適正な圧迫圧が得られず、また血行障害や神経障害及び圧迫性潰瘍を引き起こすおそれがあるため。〕
- ** 11. 面ファスナーは、脱着時には生地が傷むため無理やり引っ張らず、ゆっくり剥がすこと。

- ** 12. 使用時又は洗濯時に糸くず等が付着することにより粘着力が低下することがあるため、適時糸くず等を除去して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

高温、多湿、直射日光を避け、室温で保管すること。

****【保守・点検に係る事項】**

1. 洗濯は40℃以下のぬるま湯に市販の中性洗剤を溶かし、洗濯機で洗う場合には、洗濯ネットを使用すること。
- ** 2. 洗濯の際は、面ファスナーを留めた状態にしておくこと。
- ** 3. 乾いた厚手のタオルに包んで脱水すること。
- ** 4. 直射日光を避け陰干しにすること。
- ** 5. 塩素系の漂白剤の使用、柔軟剤の使用、ドライクリーニング、アイロンがけは生地を傷めるのでしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ・ビーエスエヌ株式会社

電 話 番 号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

外国製造所：ビーエスエヌ メディカル エスエイ デ シーブイ
BSN Medical,S.A.de C.V.

国 名：メキシコ

販 売 業 者：テルモ株式会社

お問い合わせ先：0120-12-8195 テルモ・コールセンター
(9：00～17：45 土・日・祝日を除く)

