

機械器具 12 理学診療用器具

一般医療機器 弾性ストッキング（JMDN コード：31724000）

「ジョブスト® ファロークイック」の付属品 ハイブリッドライナー

【警告】

<適用対象（患者）>

繊維に対して過敏症のある患者。

[接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため。]

*【形状、構造及び原理等】

<構造図（代表図）>



※本品はジョブスト ファロークイック（13B1X10103000035）の付属品である。

1. 種類

■タイプ


標準タイプ：足周径（A1）20-27cm

ワイドタイプ：足周径（A1）28-35cm

■サイズ

単位：cm

サイズ	足長（Z）	ふくらはぎ周径（C）
S	21-24	≦60
M	24-26	≦60
L	26-28	≦60
XL	28-31	≦60

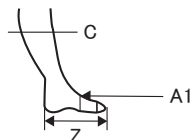

※足先～足首間に20-30mmHgの圧迫圧がかかる。

*※本品は、「ジョブスト ファローラップ ストロング（医療機器届出番号13B1X10103000032）」、「ジョブスト ファローラップ ライト（医療機器届出番号13B1X10103000033）」、もしくは「ジョブスト ファローラップ クラシック（医療機器届出番号13B1X10103000031）」と使用することも可能。

2. 材質

ポリアミド、ポリウレタン

【使用目的又は効果】

本品は、ジョブスト ファロークイックと併用し皮膚への接触刺激を軽減、足先より足首までの間に圧迫圧を与える。

なお、本体のジョブスト ファロークイックは、下肢の静脈血、リンパ液のうっ帯を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングである。末梢部を最大に中枢に向かい漸減的に圧力を加える機能を有する。

【使用方法等】

1. 装着前（サイズの決定）

各測定箇所の周径を全て計測し、適正なサイズを選択する。

注：サイズが2サイズにまたがる場合、基本的に大きいサイズを選択する。

2. 装着方法

2-1. ファロークイックを装着する前に本品を装着する。

2-2. 本品を装着後、脚全体をなで、ねじれやたるみがないようになじませる。

2-3. ファロークイックを装着する。

2-4. 膝側にライナーがはみ出した場合は、本体側に折り返す。

【使用上の注意】

<使用注意（次の患者には慎重に適用すること）>

- 患者との意思疎通が困難な場合には患者の状態をよく観察して使用すること。[動脈及び静脈の血行障害又は神経障害等を発症した際に、発見が遅れるおそれがある。]
- 本品の使用により、脚に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及びその他装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止すること。[動脈および静脈の血行障害又は神経障害等を発症するおそれがある。]

<重要な基本的注意>

- 本品は繊維製品のため、次のような場合には破損することがあるので注意すること。
 - ①強く引き伸ばしての装着
 - ②爪が伸びていたり、反っていたりする足への装着
 - ③肌荒れした手や伸びた指の爪での取扱い
 - ④鋭利なものへの接触
 - ⑤指輪、ブレスレットをつけたままでの装着
- 本品をはさみで切るなど加工、修理を行わないこと。
- 軟膏等の薬品や油脂、溶剤等が付着すると繊維が劣化するので付着しないよう注意すること。
- 継続使用後、破損、破れなど生じたら新しいものに交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

高温、多湿、直射日光を避け、室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 洗濯は40℃以下のぬるま湯に市販の中性洗剤を溶かし、洗濯機で洗う場合には、洗濯ネットを使用すること。
- (2) 乾いた厚手のタオルに包んで脱水すること。
- (3) 直射日光を避け陰干しにすること。
- (4) 塩素系の漂白剤の使用、柔軟剤の使用、ドライクリーニング、アイロンがけは生地を傷めるのでしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ・ビーエスエヌ株式会社

電 話 番 号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

外 国 製 造 所：ビーエスエヌ メディカル エスエイ デ シーブイ

BSN Medical, S. A. de C. V.

国 名：メキシコ

販 売 業 者：テルモ株式会社

お問い合わせ先：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

(9:00～17:45 土・日・祝日を除く)

