

医療用品（４）整形用品
一般医療機器 救急絆創膏（JMDN コード：34864000）

カバード

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止


＜適用対象(患者)＞

- (1) 過去にアクリル系粘着剤に対してアレルギー症状の既往歴がある患者。[アレルギー反応を発症する可能性がある。]
- (2) 感染創もしくは感染が疑われる部位には使用しないこと。
[感染を悪化させる可能性がある。]


【形状、構造及び原理等】

1) 形状（代表図）

・ロールタイプ

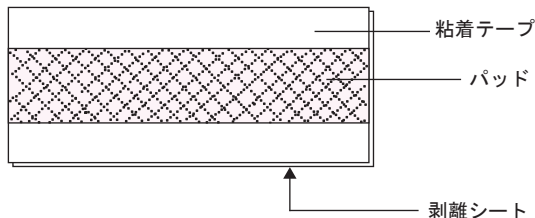

・ストリップタイプ

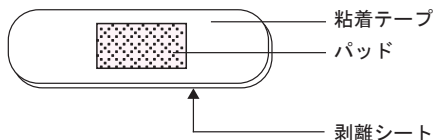

*2) 原材料

粘着テープ：ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤
パッド：ビスコース／ポリエチレン／ポリプロピレンの混紡又はビスコース／ポリプロピレンの混紡にポリエチレンネットをラミネートした不織布

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

創傷面の保護

【使用方法等】

1. 準備

- 1-1 創傷部を清潔にし、必要に応じて止血処理を行う。
- 1-2 創傷部の周囲をアルコール、ポビドンヨード等で消毒・脱脂し、乾燥させる。

【注意】 貼付部が乾燥していないと、はがれやすくなるので注意すること。

- 1-3 創傷部が十分に被覆されるサイズ／タイプを選び、適当な大きさにカットする、あるいは使用する直前に個包装を開封する。

2. 貼付

2-1 裏面の剥離シートをはがし、パッドに手が触れないように注意しながら、創面に静かに置く。

2-2 粘着テープの端をはがれたりシワにならないように、中央部から端に向かってしっかりと固定する。

【注意】 本品を引っ張って伸ばした状態で貼付すると、皮膚傷害やはがれの原因になることがあるので注意すること。

3. 除去

3-1 粘着テープの端を少しはがし、他方の手で貼付面を軽く押さえながら、粘着テープを貼付面とほぼ平行に引っ張る。

3-2 他方の端を持ち上げ、貼付面に対して180°逆方向に引っ張りながらはがす。

【注意】 上部に持ち上げるようにはがすと、皮膚を損傷することがあるので注意すること。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- (1) パッド部分が汚れたり、水に濡れたときは新しいものに貼り替えること。
- (2) 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等が生じた場合は、使用を中止すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

高温多湿を避けて保管すること。

＜有効期間＞

使用期限は外箱に記載（自己認証による）。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ・ビーエスエヌ株式会社

*電 話 番 号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

*外国製造所：ビーエスエヌ メディカル ゲーエムベアーハー

BSN medical GmbH

*国 名：ドイツ連邦共和国

**外国製造所：ビーエスエヌ メディカル リミタダ

BSN medical Limitada

**国 名：コロンビア

販 売：テルモ株式会社

*お問い合わせ先：0120-12-8195 テルモ・コールセンター
(9:00～17:45 土・日・祝日を除く)

TERUMO