

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 (JMDNコード：34864000)

カバークラスター スタンダード

再使用禁止

【禁忌・禁止】


再使用禁止

<適用対象 (患者) >

1. 過去にアクリル系粘着剤に対してアレルギー症状の既往歴がある患者。[アレルギー反応を発症する可能性がある。]
2. 感染創もしくは感染が疑われる部位には使用しないこと。[感染を悪化させる可能性がある。]

** 【形状・構造及び原理等】

** 1. 形状 (代表図)

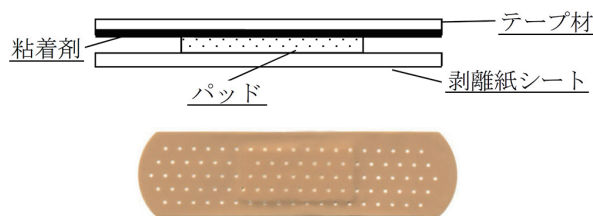

** 2. 原材料

粘着テープ：ポリエチレン、アクリル系粘着剤
パッド：ビスコース、ポリオレフィン

【使用目的又は効果】

<使用目的>

創傷面の保護

【使用方法等】

1. 準備

- (1) 創傷部を清潔にし、必要に応じて止血処理を行う。
- (2) 創傷部の周囲をアルコール、ポビドンヨード等で消毒・脱脂し、乾燥させる。

注意：貼付部が乾燥していないと、はがれやすくなるので注意すること。

- (3) 創傷部が十分に被覆されるサイズを確認し、使用する直前に個包装を開封する。

2. 貼付

- (1) 裏面の剥離シートをはがし、パッドに手が触れないように注意しながら、創面に静かに置く。
- (2) 粘着テープの端がはがれたりシワにならないように、中央部から端に向かってしっかりと固定する。

注意：本品を引っ張って伸ばした状態で貼付すると、皮膚傷害やはがれの原因になることがあるので注意すること。

3. 除去

- (1) 粘着テープの端を少しはがし、他方の手で貼付面を軽く押さえながら、粘着テープを貼付面とほぼ平行に引っ張る。
- (2) 他方の端を持ち上げ、貼付面に対して180° 逆方向に引っ張りながらはがす。

注意：上部に持ち上げるようにはがすと、皮膚を損傷することがあるので注意すること。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. パッド部分が汚れたり、水に濡れたときは新しいものに貼り替えること。
2. 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等が生じた場合は、使用を中止すること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

高温多湿を避けて保管すること。

<有効期間>

使用期限は外箱に記載 (自己認証による)。

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ・ビーエスエヌ株式会社

* 電話番号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

** 外国製造所：ビーエスエヌ メディカル リミタダ

BSN medical Limitada

** 国名：コロンビア

販売：テルモ株式会社

* お問い合わせ先：0120-12-8195 テルモ・コールセンター
(9:00~17:45 土・日・祝日を除く)

