

機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 歯科技工用鉗子 (70935000)

ホワイトポストカッター

【禁忌・禁止】

本品はホワイトポスト(ファイバーポスト)専用の切断器具である。金属等他の材質の切断には用いないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

寸法：73.5×140×10mm

重量：約 90g



2. 原材料

ステンレス鋼

3. 原理

二枚のステンレスのプレートにφ1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.8mmの貫通孔があり、この貫通孔にホワイトポスト(認証番号:220AGBZX00286000)を通し、ハンドルを握ることにより貫通孔がふさがりホワイトポスト(ファイバーポスト)の切断を可能にするものである。

【使用目的又は効果】

歯科治療に用いるグラスファイバー製根管ポストを定めた長さに切断する器具である。

本品にはφ1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.8mmの穴が開いており、各種サイズを有するポストを該当する穴に入れ、ハンドル部に力を加えることで切断する。

【使用方法等】

ファイバーポストの形状(φ1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.8mm)に合わせて貫通孔に入れハンドルを握り、ホワイトポスト(ファイバーポスト)を切断する。

【使用上の注意】

- 本品でホワイトポスト(ファイバーポスト)以外の線材を切断しないこと。
- 使用後はアルコールにて消毒し、乾燥状態で保管すること。
- オートクレーブによる殺菌は問題ない。ガストーチ等による直接の過熱は切れ味に影響を与えるため行わないこと。
- 廃棄する場合は、地方自治体の条例または規則に従うこと。

*【保守・点検に係る事項】

使用前、使用後に、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【保管方法及び有効期限等】

＜保管方法＞

商品ケースに入れ、過度な湿気は避けること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

有限会社 デントレード

TEL：072-620-0523

＜外国製造業者＞

アイエーイー サージカル インストルメント カンパニー

IAA Surgical Instruments Company

(国名：パキスタン)