

機械器具 64 歯科用探針
一般医療機器 歯科用探針（35812000）

デントレード ポストメジャー

【禁忌・禁止】

本品は、金属アレルギーが表れる可能性があるため、金属アレルギーの患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

寸法：全長約 27mm

重量：約 10g



*2. 主な原材料

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科診療で触診等に用いる。

【使用方法等】

ファイバーポストの長さを決定するに当たり、根管ポストの形成が済んだ歯牙の根管ポスト孔に本品を挿入し、本体に付与された目盛りを読み取ることで長さを記録する。

【使用上の注意】

- 本品は記載の使用目的のみに使用すること。
- 本品は歯科医療有資格者のみ使用すること。
- 使用前に汚れ、傷、曲がり、破損等の異常が無いか確認し、必ず洗浄、滅菌すること。
- 先端が鋭利になっているものがあるので、誤って手等を刺さないように注意すること。
- 破損、曲がり等の原因になり得るので、使用時に必要以上の力を加えないこと。
- 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- 洗浄には歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- 次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤、塩化ベンザルコニウムグルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水（超酸性水）等の機能水や家庭用洗剤は、金属腐食を起す恐れがあるので使用しないこと。
- 薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがあるため、薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を必ず守ること。

*【保守・点検に係る事項】

使用前、使用後に、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

- 消毒を行う時は、グルタール製剤は使用しないこと。
- すすぎを十分に行わないと、高圧蒸気滅菌により腐食や変色する場合があるので注意すること。
- 本品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次加工（改造）することは、折損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 長期の使用により、金属疲労や摩耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。
- 損傷、変形（表面キズ、曲がり、錆）、汚染等のあるものは使用しないこと。
- 口腔内に落下、誤嚥の可能性があるので、本体上部の孔にフロスシルク等を通して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- 保存期間の長短に関わらず、腐食を防ぐために洗浄後直ちに乾燥させること。
- もらい錆を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管、収納しないこと。
- 本品は、歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

有限会社 デントレード

TEL：072-620-0523

<外国製造業者>

アイイーイー サージカル インストルメント カンパニー

IAA Surgical Instruments Company

（国名：パキスタン）