

## SD ダイヤモンドバー

### 【警告】


- 高速回転下で使用するため、使用中に破折し、人体を傷つけるおそれがあるので使用上の注意を厳守すること。
- 過度の加圧で使用した場合には、発熱の原因につながり、人体を傷つけるおそれがあるので、ソフトタッチ（適正作業加圧）を厳守すること。

### 【禁忌・禁止】

- ニッケル及びクロムに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往症のある患者には、使用しないこと。
- 本品に変形、損傷、劣化等の異常が見られた場合は、使用しないこと。
- 最大回転数を超えた使用はしないこと。最大回転数を超えた場合は破折しやすくなり、人体を傷つける恐れがある。
- 本品の形態変更や改造はしないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状

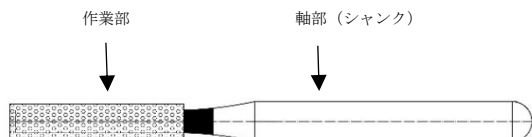

#### 2. 主な原材料

- 作業部：ダイヤモンド砥粒  
軸部：ステンレス 402J、ステンレス 306

### 【使用目的又は効果】

微細なダイヤモンド結晶で砥着されたスチール製の作業部を持ち、歯科用ハンドピースに装着し、歯牙、骨等の硬組織を研削するために用いる回転式の研削器具である。金属、プラスチック、陶材、及び同様の材料の研削に用いることもできる。

### 【使用方法等】

- 本品を使用する際は保護手袋、保護メガネ、保護マスク等を着用すること。
- 使用目的以外の目的で使用しないこと。
- 正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 形態変更や改造はしないこと。
- 使用前に必ず洗浄・滅菌【保守・点検に係る事項】を参照すること。
- 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄液に浸漬すること。
- 本品にはニッケルとクロムが含まれる。ごく少数ではあるが、これらの成分に対してアレルギー反応を起こす場合があります。アレルギー反応が生じた場合は、医師の診断を受けること。
- 破損、欠け、脱落、曲がりの原因となるため、使用時に必要以上の力を加えないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

- 使用前に製品を点検し、錆、変形、損傷、劣化等の異常が見られた場合は、使用しないこと。
- 使用後は、ハンドピースから取り外して、洗浄、消毒、滅菌を行うこと。

#### <洗浄>

使用後は、出来るだけ早くに血液、組織などの異物を除去し、洗浄を行う。血液等が乾燥してバーに付着している場合は、ブラシや超音波洗浄を使用するなどして洗浄する。

#### <滅菌方法>

本品を滅菌トレイに置き、高圧蒸気滅菌（134℃、6分以上）を行う。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### <保管方法>

- 水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- 歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

### 【製造販売業者】

<製造販売業者>  
有限会社 デントレード  
TEL：072-620-0523

#### <外国製造業者>

チェンドウ サニー メディカル イクイップメント  
Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd.  
(国名：中華人民共和国)