

スクリーポストリムーバー

【形状・構造及び原理等】

1.形状



チャック（2 種）

本体

ローレット

2.原材料

チャック：黄銅

本体、ローレット：ステンレス

【使用目的又は効果】

スクリーポストやスクリーピンを除去する為に用いる。

【使用方法等】

スクリーポストが装着された支台歯の上部をスクリーポストの上部が 2～3mm 露出するよう除去する。スクリーポストリムーバーのチャック部にポストを入れ、ローレットを左回転させ、ポストを把持し、さらに左回転させることでポストを除去する。

- 1) 2 種類のチャックから、対象のスクリーポストに合った大きさを選択して下さい。
- 2) 選択したチャックを本体にセットし、ローレットをネジ込みます。（注：逆ネジ=左回転で締まります）
- 3) 対象のスクリーポストにスクリーポストリムーバーを差し込みます。本体を持ちローレットを左回転させることでポストを締め付けます。
- 4) さらに左回転させることでスクリーポストの除去ができます。

【使用上の注意】

- 使用前、使用後は破損、ヒビ、大きなキズや腐食がないことを確認すること。これらがあつた場合は、破棄すること。
- 洗浄後は、流水でしっかりとすすぐこと。
- すすぎ後は、速やかに乾燥させること。
- 滅菌トレー又は滅菌パック等に本品を入れ、オートクレーブにて滅菌すること。
- 洗浄、消毒、滅菌後は清潔な場所で保管すること。
- もらい錆を防ぐため、錆びている器具と一緒に滅菌、保管をしないこと。

【保守・点検に係る事項】

1.洗浄

- 1) 使用後は、異物を除去し、洗浄する。
- 2) 吸水性タオルやティッシュペーパーで、水分をふき取る。

2.消毒

- 1) 汚れが除去されていることを確認後、消毒を行う。
- 2) 消毒液が残らないよう十分にすすぎ、乾かす。

3.滅菌

- 1) 本品を滅菌トレー又は滅菌パック等に入れ、密封する。
- 2) オートクレーブ滅菌（134℃、5 分以上）を行う。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- 常温保管

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

有限会社 デントレード

TEL：072-620-0523