

歯科材料 09 歯科用研削材料

「一般」歯科用研磨器材

JMDN コード:70907000

BC ロビンソンブラシ

【形状・構造等】

1)成分

- ①軸部 : ステンレス鋼
- ②作業部 : 豚毛

2)構造

- ①軸部の規格 : JIS T 5504-1 軸部形式 2
軸部の長さ : スタダード
- ②作業部 : 豚毛の硬さ及び直径
種類 No.9 ソフト 直径 14.2 mm 硬さ 軟毛
No.11 ソフト 直径 17.4 mm 硬さ 軟毛



No.9 ソフト

No.11 ソフト

【性能、使用目的、効能又は効果】

豚毛研磨材で、歯科補綴物等の研磨に用いる。

【操作方法又は使用方法等】

歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、歯科用研磨剤を塗りながらソフトタッチで断続的に被研削物に押し付けて研磨します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) ハンドピース(タービン) メーカーの指定に従ってシャックを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 予め回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3) 頭部の細い、長い、大きい形状のものは、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ① 過度の回転数を超えて使用しないこと。
 - ② 損傷、変形(錆、表面キズ、曲がり、汚染)等があるものは、使用しないこと。

- ③ 排気装置の備わった環境で作業すること。
- ④ 鋳造物を研磨、つやだしする際には、保護眼鏡等を使用すること。
- ⑤ 公的機関が認可した防護マスクを使用し粉塵を吸入しないこと。
- ⑥ 本材は【性能、使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

20 本入り/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

有限会社 デンタルウェーブ

〒530-0015 大阪市北区中崎西 1-4-22

電話番号 06-4802-6617

Fax番号 06-4802-6618

* 製造業者

上海志衆製刷廠 (中国)

Shanghai zhizhong make brush factory (China)