

*2018 年 2 月
2017 年 12 月

届出番号 12B2X00022000074

機械器具11 放射線障害防護用器具
一般医療機器 放射線防護用前掛 (38355000)
(放射線防護用胸部前掛 (38356000))
(放射線防護用生殖線防護具 (38367000))

* TRU-LITE セパレートエプロン

【形状・構造及び原理等】

薄い1枚の鉛又は鉛と同等の材料を覆う耐液体性の外部カバーで構成されている。
胸部防護(ベスト)と生殖線防護(スカート)に分かれている。



ベスト(S.M.L.XL)

スカート(S.M.L.XL)

②触覚により内部の遮蔽材等に破損がないか確認。

定期点検

X線写真撮影などにより内部の遮蔽材の状態を確認。

滅菌方法について(該当せず)

【資料請求先】

株式会社 ティーアンドエス
〒278-0051 千葉県野田市七光台 433-1
TEL:04-7127-7323

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:
株式会社ティーアンドエス
千葉県野田市七光台 433-1

製造業者:
Cworld
韓国

【使用目的又は効果】

患者、術者、又は他の人員の体の一部を医療又は歯科における放射線被曝から保護する。

【使用方法等】

形状に合わせて体に装着し留め具又はマジックテープで固定する。

【使用上の注意】

- ① 水等がかからない場所で使用すること。
- ② 保管の際は畳み置きをせずにハンガーやラック類に掛けておくこと。
- ③ 上に座ったり、物を重ねないこと。
- ④ 機材の角や鋭利なものに当たらないよう扱うこと。
- ⑤ 落下させたり、強い衝撃を与えると変形・破損することがあるので丁寧に扱うこと。
- ⑥ 本品を廃棄する場合は産業廃棄物となります。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【保管方法及び使用期間等】

直射日光が当たる場所、強い紫外線が当たる場所、各種放射線が当たる場所、高温高湿やほこりの多い場所は避けて保管すること。
長期保管の際はハンガーにかけて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

日常点検

- ① 目視により外観に損傷がないかを確認。

取扱説明書を必ずご参照下さい。