

\*2018年2月  
2017年12月


届出番号 12B2X00022000075

機械器具11 放射線障害防護用器具  
一般医療機器 放射線防護用カラー (38358000)

## \* TRU-LITE ネックガード

### 【形状・構造及び原理等】

薄い1枚の鉛又は鉛と同等の材料を覆う耐液体性の外部カバーで構成されている。

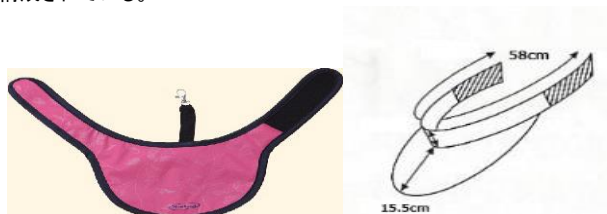

### 【資料請求先】

株式会社 ティーアンドエス  
〒278-0051 千葉県野田市七光台 433-1  
TEL: 04-7127-7323 FAX: 04-7127-6188

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:  
株式会社ティーアンドエス

製造業者:  
Cworld  
韓国

### 【使用目的又は効果】

診断や治療のための医科・歯科処置における不必要な放射線被曝から患者、術者、又は他の人員の頸部又は甲状腺を保護する。

### 【使用方法等】

形状に合わせ頸部に装着しマジックテープで固定する。

### 【使用上の注意】

- ① 水等がかからない場所で使用すること。
- ② 保管の際は畳み置きをせずにハンガーやラック類に掛けておくこと。
- ③ 上に座ったり、物を重ねないこと。
- ④ 機材の角や鋭利なものに当たらないよう取り扱いのこと。
- ⑤ 落下させたり、強い衝撃を与えると変形・破損することがあるので丁寧に取り扱いのこと。
- ⑥ 本品を廃棄する場合は産業廃棄物となります。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

### 【保管方法及び使用期間等】

直射日光が当たる場所、強い紫外線が当たる場所、各種放射線が当たる場所、高温高湿やほこりの多い場所は避けて保管すること。  
長期保管の際はハンガーにかけて保管すること。

### 【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

日常点検

- ① 目視により外観に損傷がないかを確認。
- ② 触覚により内部の遮蔽材等に破損がないか確認。

定期点検

X線写真撮影などにより内部の遮蔽材の状態を確認。

滅菌方法について(該当せず)

取扱説明書を必ずご参照下さい。