


機械器具(06) 呼吸補助器
管理医療機器 特定保守管理医療機器
酸素濃縮装置(12873002)
「ハイサンソ i7」の付属品
加湿器用バブラー


【形状、構造及び原理等】

1. 構成

ハイサンソ i7の加湿器

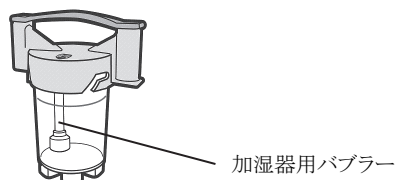

加湿器用バブラー

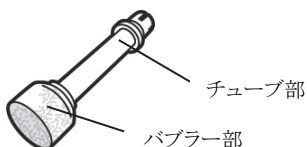

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

ハイサンソi7の加湿器キャップに装着して、酸素濃縮空気湿度を高くする目的で使用する。


【使用方法等】

詳細はハイサンソi7の取扱説明書の「3.ご使用方法」を参照してください。


1. 使用方法

(1) 加湿器用バブラーの取り付け

- ① バブラー部をチューブ部の先端部に確実に押し込んで取り付ける。

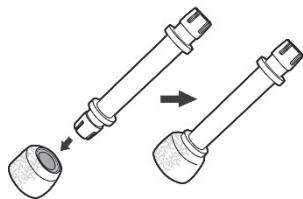

- ② 加湿器キャップを加湿器から外す。
③ 加湿器用バブラーを加湿器キャップに確実に押し込んで取り付ける。

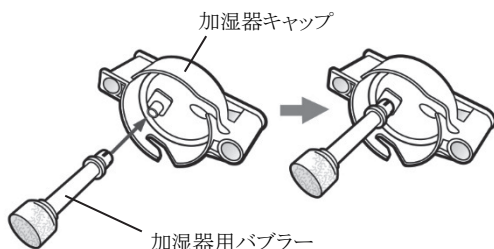

使用方法等に関連する使用上の注意

- 本製品はハイサンソi7を5L/分以上の高流量で使用中に加湿不足を感じる場合に使用すること。[5L/分未満の流量で使用しても酸素濃縮空気湿度は高くない。]
- 汚れがひどい場合には交換のため、指定の連絡先に連絡すること。
- 本品は、以下の酸素濃縮装置にも使用できる。以下の酸素濃縮装置と使用する場合は、本書および組み合わせて使用する酸素濃縮装置の添付文書、取扱説明書をよく読み正しく使うこと。

販売名	認証番号
ハイサンソ7R	222AHBZX00009000

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法

清潔な状態で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

帝人ファーマ株式会社

電話: 03-3506-4077(代表)



社内管理コード
L192X11200-01