

器 25 医療用鏡

一般医療機器 歯鏡 31776000

ウルトラブライツデンタルミラー

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 原材料

ミラー本体 : ガラス本体に二酸化銀コーティング

グリップ : シリコンラバー

【使用目的又は効果】

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具。

【使用方法等】

1. 患者ごとに洗浄、殺菌を行います。
2. 口腔内で本品の角度を調整し、鏡面に映った画像を撮影します。
3. 使用中は鏡面曇りを避けるために 50℃程度の水に浸してください。
4. 使用後は、流水により唾液などを流し、食器用洗剤で洗浄して下さい。洗浄後、清潔なガーゼなどの柔らかい布で水分を拭き取って下さい。本体の水分拭き取り後にシリコンカバーを外し、グリップ内の水分を拭き取って下さい。

【使用上の注意】

- ・ 本体に強い衝撃を与えないでください。破損したり、傷ついたりするおそれがあります。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

1. 高温多湿を避け、直射日光のあたらない場所で保管してください。
2. 保管する前には、必ず十分に乾燥させて下さい。汚れ、水分等の付着はシミの原因となることがあります。
3. サビのある器具や化学薬品から離れたところに保管・収納してください。サビ・変色の原因となります。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前・使用後に、破損・ヒビ・キズ・変色・腐食等の異常がないかを点検してください。
2. 洗浄する際の注意
 - 鏡面を傷めるおそれのある磨き粉、金属ウール、金ブラシ等は使用しないで下さい。
 - 超音波洗浄器は鏡面が剥離する可能性がありますので使用しないで下さい。
 - ジェットウォッシャーは使用しないで下さい。鏡面が傷つくおそれがあります。

- 超酸化水(超酸性水)等は、ミラーコーティングを腐食させることがあるので使用しないで下さい。
- 鏡面を傷めるおそれがありますので、他のインスツルメントと接触させないようにしてください。

3. 消毒する際の注意

- 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書を参照し、金属腐食を起こすものは避けて下さい。

4. オートクレーブを使用する際の注意

- 本品はオートクレーブ滅菌をすることが可能ですが、オートクレーブの工程・手順によってはミラーを傷つけ、使用不可になってしまうおそれがありますので、オートクレーブをする際には十分気をつけて下さい。
- 十分に洗浄して付着物を除去して下さい。
- 鏡面を傷めるおそれがありますので、他のインスツルメントと接触させないようにしてください。
- オートクレーブの乾燥工程は行わないでください。水滴やオートクレーブ庫内の汚れが斑点となって鏡面に残ることがあります。
- 滅菌バッグは使わないでください。水の跡が残ったり、ミラーコーティングが滅菌バッグのフィルムに張り付いたりすることがあります。
- アルコール等の薬剤を使用した高圧滅菌は劣化の原因となるため使用しないで下さい。
- 138℃を超える滅菌器を使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者

有限会社デンタルテクニカ

〒567-0881 大阪府茨木市上中条1-1-37

<http://www.dentaltechnica.com>

info@dentaltechnica.com

TEL 072-621-0884 FAX 072-621-0844

外国製造業者

MK-dent GmbH

(国名:ドイツ)