

器 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 (JMDNコード:31776000)

HS ミラー

【禁忌・禁止】

・本品の材質に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理】

本品は、ミラートップ及びミラーハンドルからなる。本品は、口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具である。

材質:ステンレス鋼

【使用目的または効果】

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、通常、ミラーヘッド及びハンドルからなる。

【使用方法等】

- 使用前に滅菌を行う。(高圧蒸気滅菌:134°C、3分)
- ミラーハンドルとミラートップを接続する。
- ミラーハンドルを把持し、ミラートップを用いて口腔内診査又は圧排を行う。

【使用上の注意】

- 本品は、歯科医療従事者以外は使用しないこと。
- 本品の使用中に感作またはアレルギー反応が現れた場合は、直ちに使用を中止し、専門家の診察を受けさせること。
- 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
- 破損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。
- 使用前・使用後に破損、ヒビ、傷 変形、変色、腐食、稼動部の動き等に異常がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 洗浄には歯科器具用防錆洗浄剤を使用すること。
- 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、充分乾燥させてから保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- 滅菌後はほこり及び水気のない場所で直射日光を避けて保管すること。
- 腐食性薬剤及びその蒸気を避けること。
- もらいさびを防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- 歯科従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者:有限会社デンタルテクニカ

電話:072-621-0884

製造業者:Elmed Instruments (Pvt.) Ltd. (国名:パキスタン)