

歯科材料(09) 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 JMDN70908000
デンタルラボシステム-imes-icoreCADCAM ミリングバー

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

対象	型式	作業部形状	作業部径	軸径	全長	首下長	コーティング
PMMA/ リックス /PEEK/LAVA	526004	ボールエンド	φ2.5	φ3.0	48	20	-
			φ1.0		48	14	-
Zr/PMMA /ワックス/LAVA	526016	ボールエンド	φ2.5		48	20	-
			φ1.0		48	19	-
		ボールエッジ	φ0.6		48	20	-
			φ0.3		48	10	○
	526012	フラットエンド	φ0.6		53	15	○
			φ0.6		53	20	※
Zr	526013	ボールエンド	φ2.5		53	14	※
			φ1.0		53	14	※
ガラスセラミック二枚 い酸処理/長石セ ラミック	526005	ボールエンド	φ2.5		40	15	-
			φ1.0		40	10	-
		ボールエッジ	φ0.6		40	10	-
Co-Cr/Ti/ナノコン ポジット	526018	ボールエンド	φ3.0		38	15	○
			φ2.0		38	12	○
			φ1.0		38	9	○
	526003	ボールエッジ	φ0.6		48	15	○
全て	526000	ボールエンド	φ1.5		38	12-13	-
	526001	フラットエンド	φ1.5		47	14-15	-

<共通事項> 材質：超硬合金
<コーティング> ○：有り -：なし ※：ダイヤモンド



【使用目的、効能又は効果】
各種歯科用 CAD/CAM 材料を切削・研削加工するために用いる回転器具で、専用の加工機に取り付けて使用する。

【操作方法又は使用方法等】
操作方法又は使用方法

【組み合わせて使用する医療機器(軸径 φ 3.0mm)】
デンタルラボシステム-imes-icoreCORiTEC140i

デンタルラボシステム-imes-icoreCORiTEC250i

デンタルラボシステム-imes-icoreCORiTEC350i

対象	型式	作業部形状	作業部径	軸径	全長	首下長	コーティング
PMMA/Wax/h tp/PEEK/Lava Ultimate	526012	フラットエンド	φ4.0	φ6.0	55	33	-
	526004	ボールエンド	φ2.5		53	30	-
			φ1.0		53	30	-
Zr/PMMA/Wa x/Lava Ultimate	526019	ボールエンド	φ2.5		53	30	-
			φ1.0		53	30	-
		ボールエッジ	φ0.6		53	30	-
	526012	ボールエンド	φ0.6		53	30	-
	526019	ボールエッジ	φ0.6		50	26.5	-
			φ0.3		53	30	-
Zr/Al	526013	ボールエンド	φ3.0		53	30	-
			φ2.0		53	30	-
			φ2.5		53	30	○
ガラスセラミック /Lithium-disili cate/Feldspar ceramics	526005	ボールエンド	φ2.5		40	20	※
			φ1.0		40	20	※
		ボールエッジ	φ0.6		40	20	※
Co-Cr/Ti/ナノコン ポジット	526011	ボールエンド	φ3.0		45	21.5	○
			φ2.0		45	21.5	○
			φ1.0		45	21.5	○
			φ3.0		50	27	○
			φ2.0		45	27	○
	526007	ボールエンド	φ1.0		50	26	○
			φ0.6		45	21.5	○
			φ1.5		48	24.5	○
			φ1.5		48	24.5	○
			φ1.5		46	24.5	○
Zr/PMMA /Co-Cr/Ti (universal)	526002	フラットエンド	φ1.5		46	24.5	○
	526021		φ1.5		46	24.5	○
	526001	ボールエンド	φ1.5		53	30	-
			φ0.5		45	21.5	-
	526000	ボールエンド	φ0.5		45	21.5	-
	526001	フラットエンド	φ0.5		45	21.5	-
			φ0.5		45	21.5	-

【組み合わせて使用する医療機器(軸径 φ 6.0mm)】
デンタルラボシステム-imes-icoreCORiTEC350i

【操作方法】

詳細な仕様方法については、機器に付属の取扱説明書等を参照してください。

- (1) 機器の取扱説明書に従い、本材を機器本体に取り付ける。
- (2) 適切なプログラムでミリングを行う。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- (1) 本材を機器本体に確実にセットし、ブレやがたつき等の異常がないか確認してから加工を行うこと。
- (2) 使用前・後に変形や破損等がないか確認すること。

【使用上の注意】

- (1) 本材は、専用の加工機以外の機器には使用しないこと。
- (2) 変形、破損、腐食等があるものは使用しないこと。
- (3) 本材の加工、改造は行わないこと。
- (4) 本材の使用中に異常な振動や音を感じた際は、直ちに使用を中止すること。
- (5) 本材は刃物である為、取扱いには十分注意すること。
- (6) 【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (7) 本材は歯科用 CAD/CAM 材料に関して、十分な知識及び技能を有する歯科医療有資格社以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

- ・水分・腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負担）及び汚染を受けない様に保管すること。
- ・歯科の従事書以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

【単品】

1 本入り

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

【製造業者】

imes-icore GmbH
Im Leibolzgraben 16
36132 Eiterfeld, Germany
TEL +49 (0) 6672 - 898 228
FAX +49 (0) 6672 - 898 222

【製造販売業者】

株式会社デンタス
徳島県徳島市問屋町 48 番地
TEL 088-657-3115
FAX 088-657-3121

取扱説明書を必ずご参照ください。