

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 JMDNコード:70757000

D-FINE アナログ

【禁忌・禁止】

1. 他社製品と組み合わせをしないこと。
2. 歯科診療・歯科治療以外に使用しないこと。
3. 器具の形態変更や改造はしないこと。
4. 本来の用途以外には使用しないこと。
5. 再使用しないこと。

【形状・構造及び原理】



インプラント接合部
互換メーカー・規格により形状が異なる

基部
模型に埋没する

[形状・構造] 下記の通り 名称 外径×長さ(mm)

・ノーベル互換

エクスターナル NP	3.5×12.0
エクスターナル RP	4.1×12.0
エクスターナル WP	5.0×12.0
リブレイスNP(3.5)	3.5×11.0
リブレイスRP(4.3)	4.3×11.0
リブレイスWP(5.0)	5.0×11.0
リブレイス(6.0)	6.0×11.0
アクティブNP(3.5)	3.5×11.0
アクティブRP(4.3/5.0)	3.9×11.0
マルチユニットR	4.8×15.0
マルチユニットW	6.0×14.0
・ストローマン互換	
ティッシュレベルRN(4.8)	4.8×12.5
ティッシュレベルWN(6.5)	6.5×12.5
ボーンレベルNC(3.3)	3.3×12.5
ボーンレベルRC(4.1/4.8)	4.1×12.3

・CAMLOG 互換

K type 3.3	3.3×12.0
K type 3.8	3.8×12.0
K type 4.3	4.3×12.0
K type 5.0	5.0×12.0

・Astra 互換

Yellow (3.0)	3.0×15.0
Aqua (3.5/4.0)	3.5×15.0
Lilac (4.5/5.0)	4.5×15.5
20°Uni	3.5×13.5

・XiVE 互換

Silver	3.4×13.0
Yellow	3.8×13.0
Blue	4.5×13.0

・POI 互換

EX 3.7	3.7×9.0
EX 4.2	4.2×9.0

・Zimmer 互換

Spline 3.75	3.75×13.0
Spline 5.0	5.0×13.0
Screw Vent 3.5	3.5×13.7
Screw Vent 4.5	4.5×13.7
Screw Vent 5.7	5.7×13.7

・3i 互換

Internal 3.4	3.4×14.6
Internal 4.1	4.1×15.0
Internal 5.0	5.0×15.0
External 3.4	3.4×10.0
External 4.1	4.1×11.5
External 5.0	5.0×11.5

・OSSTEM 互換

TS-3.5	3.5×15.0
TS-4.0	4.0×15.0

・THOMMEN 互換

SPI 35	14.0×3.6
SPI 40	14.0×4.1
SPI 45	14.0×4.6

・PLATON 互換

Type-4	12.0×4.0
--------	----------

・BIOHORIZON 互換

INT 3.5	12.6×3.7
INT 4.5	12.6×4.5
EXT 3.5	11.8×3.7
EXT 4.0	11.8×4.2

【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる。

【使用方法】

作業模型上にインプラントを再現するために用いる。

重要な基本的注意

1. 使用者は、使用する際に本製品の外観を確認し、汚れ、腐食、損傷、欠損などの異常が無いことを確認すること（著しい傷や摩耗があるばあいには破損する恐れがある。）
2. 過剰な外圧をかけないこと
3. 使用者は、本製品の使用に際し、あらかじめ手技およびその手順について十分熟知した上で使用すること。
4. 本品は歯科医療有資格者が使用すること。

【使用上の注意】

- ・使用後は歯科用防腐洗浄剤、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
- ・洗剤の残留がないように十分すすぐこと。
- ・洗浄、装束、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
- ・加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器など）の乾燥温度に注意すること。
- ・高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。
- ・オートクレーブ温度（乾燥温度も含む）135℃以下。

【保管方法及び有効期間】

- ・歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。
- ・本品は、品質保持のため高温・多湿・直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。

【包装】

各1本／包

【製造販売業者および製造業者の氏名又は名称及び住所等】

【製造業者】

KJ MEDITECH CO., Ltd.
959-21, Daechon-dong, Buk-gu, Gwangju, Korea
登録番号：BG10300205

株式会社 DentalBank
福岡県大野城市御笠川 2-8-9
登録番号：40BZ200092

【製造販売業者】

株式会社デンタス
徳島県徳島市問屋町 48 番地
認定区分：医療機器一般
認定番号：36B2X10005