

2019年7月8日作成（新様式第1版）

製造販売届出番号：28B2X10028000020

機械器具 60 歯科用エンジン
 一般医療機器 歯科技工用高速レーズ 70740000

J T - 2 4 A 高速レーズ

【禁忌・禁止】

- ・ 熟知したものを以外は、使用しない事。
- ・ 使用目的以外での目的で使用しないこと。


【形状・構造及び原理等】

1. 高速レーズ本体



電源：100V 50～60Hz
 消費電力：180W
 回転数：2,800rpm
 外形寸法：34×32×26cm
 重量：14 kg

2. 付帯品・集塵機

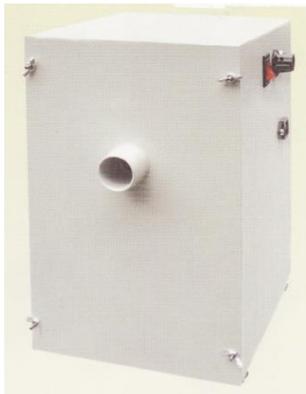

電源：100V 50～60Hz
 消費電力：470W
 最大気圧：17 KPa
 最大流量：70 m³/h
 真空度：-9.8 KPa
 騒音：-60db 以下
 外形寸法：35×20×35 cm

3. 作動原理

電動機を用いて補綴物を研削・研磨する装置で、高速回転のものをいう。研削・研磨作業で発生する粉塵等を吸引するための集塵機を付帯する。電気レーズ本体後部の粉塵吸引口と集塵機の吸込み口とをフレキシブルホースで接続する。

【使用目的又は効果】

本品は、電動機を用いて補綴物を研削・研磨する装置で、高速回転のものをいう。集塵機を付帯する。

【性能及び安全性に関する規格】

外観：正しい輪郭を持ち、サビ、歪み、汚染、その他欠陥があつてはならない。

作動：電源に接続し、スイッチをONおよびOFFすることにより、レーズが異常なく回転作動および停止作動をすること。

【使用方法】

1. 取付・設置
 - ① 機器の詳細な設置方法は、取扱説明書を参照のこと。
 - ② 機器の取付・設置は専門の担当者（当社または当社指定の業者）が行う。
2. 操作方法または使用方法
 機器の詳細な操作方法および使用方法は取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

- ① 本品は、[使用目的、効能又は効果]の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ② 研削・研磨材のシャンクを確実に奥まで挿入して半チャックでないことを確認すること。
- ③ 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- ④ 本品の使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
- ⑤ 研削・研磨材の頭部の細いもの、長いもの、大きい形状のものは、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度や過度の加圧でのしよは避けること。
- ⑥ 作業時は、吸塵装置、防塵マスク等を使用すること。また、目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ⑦ 使用終了時、未使用時あるいは清掃時は必ずメインスイッチを切り、電源プラグを抜くこと。
- ⑧ 本品は、歯科医療有資格者以外は、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間】

1. 水のかからない場所に設置・保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

本体	1台/箱
集塵機	1台/箱

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者
 : 有限会社 ディーシーエルタニモト
 住所 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢 1283
 TEL 0790-63-2788
 FAX 0790-63-2788

製造業者
 : SHANGHAI PIGEON DENTAL MFG. CO., LTD. 中国

取扱説明書を必ず参照のこと