

2019 年 7 月 29 日作成（新様式第 1 版）

製造販売届出番号：28B2X10028000036

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用ワックス形成器 35794000

J T - 2 1 電気ワックスナイフ

【禁忌・禁止】

- ・ 熟知したもの以外は、使用しない事。
- ・ 使用目的以外での目的で使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本体 電気ワックスナイフ Electric Wax Knife

1. 主な仕様

電源：AC100V/110V 50/60Hz
消費電力：20W
温度調節範囲：50～200℃
外形寸法：幅119×長さ159×高さ73mm
重量：1.27Kg

2. 外観形状



コントロールボックス

ペン型ナイフ

コード

3. 作動原理

ペン型ナイフに内蔵した電気ヒーターにより刃先が加熱される。
コントロールボックスのボタンにより電源ON/OFFおよび加熱温度の調節を行う。
各種形状・サイズの刃先チップを付帯する。

熱
よ
帯

付帯品 【ワックス保温容器 Digital 4-Well Pot】

1. 主な仕様

電源：AC100V/110V 50/60Hz
消費電力：120W
温度調節範囲：50～120℃
外形寸法：幅120×長さ174×高さ64mm
重量：2.5 Kg

2. 外観形状




付帯品 ワックスナイフ保温器 Wax Knife Heater

1. 主な仕様

電源：AC100V/110V 50/60Hz
消費電力：130W
温度調節範囲：50～120℃
外形寸法：幅80×長さ190×高さ80mm
重量：0.5 Kg

2. 外観形状

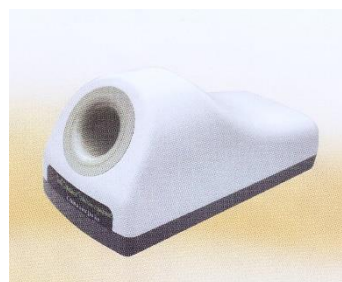

【使用目的、効能又は効果】

ワックスパターンを彫刻するために用いる歯科用器具をいう。通常、様々なサイズ及び形状の鈍な刃先をもち、ワックスパターン成形時にワックスを軟化させるために加熱させることができる。
ワックスを所要の温度に保持しておくワックス保温容器 DIGITAL 4-WELL POT を付帯する。

【品目仕様等】

外観： 正しい輪郭を持ち、サビ、歪み、汚染、その他欠陥があつてはならない。

作動： コントロールボックスのボタンにより電源ON/OFFおよび加熱温度の調節を行う。またペン型ナイフに内蔵した電気ヒーターにより刃先が加熱される。各種形状・サイズの刃先チップを付する。

【操作方法又は使用方法等】

- ① 電源コードによりコントロールボックスを電源に接続する。
- ② ペン型ナイフのコードをコントロールボックスに接続する。ペン型ナイフを同時に2本使用する場合は2本ともコントロールボックスに接続する。
- ③ ペン型ナイフの先端に、作業に適した形状サイズの刃先チップを装着する。
- ④ コントロールボックスの電源スイッチ（緑色）をONにし、ライト点灯を確認する。
- ⑤ 作業温度（刃先加熱温度）を、コントロールボックスのディスプレイを見ながら、▲▼ボタンを操作しながら設定する。
- ⑥ 作業終了時に電源スイッチをOFFにし、ペン型ナイフのコードおよび電源コードを外す。

【使用上の注意】

- ① 本品は、[使用目的、効能又は効果]の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ② 本品の使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
- ③ 作業時は、吸塵装置、防塵マスク等を使用すること。また、目の損

取扱説明書を必ず参照のこと

傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。

- ④ 使用終了時、未使用時あるいは清掃時は必ずメインスイッチを切り、電源プラグを抜くこと。
- ⑤ 本品は、歯科医療有資格者以外は、使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1. 水のかからない場所に設置・保管すること。
- 2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装内訳】

本体 1台/箱

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

：有限会社 ディーシーエルタニモト

住所 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢 1283

TEL 0790-63-2788 FAX 0790-67-9090

製造業者

：SHANGHAI PIGEON DENTAL MFG. CO., LTD. 中国

取扱説明書を必ず参照のこと