

2018 年 7 月 2 日作成（様式第 1 版）

製造販売届出番号：28B2X10028000116

歯科材料 6 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 70891000

A R C シ リ コ ー ン

【形状・構造及び原理】

本材は、下記により構成される。

種 類	色 調	成 分
ベース	ホワイト	液状シリコーンゴム
ハードナー	ブルー	シリカ 他

【使用目的又は効果】

シリコーンゴムを主成分とする印象材で、複模型の製作に用いる。

【性能及び安全性に関する規格】

物理的性質

混 和 比	1 : 1
混 和 時 間	約 4 5 秒
作 業 時 間	約 5 分間
硬 化 時 間	約 3 0 分間（室温 2 3℃）

【使用方法】

- （1）複印象用の専用フラスコ（プラスチック製／ガラス製）を用意します。
- （2）マスターモデルは乾燥させ、油脂などの汚れがないようにしておきます。
- （3）ワックスでブロックアウト処理したマスターモデルを専用フラスコのベース「」に固定します。プラスチック製フラスコのパラタルアーチは、模型に合わせ高さを調整します。
- （4）ベース（白）とハードナー（青）を 1 : 1 の割合でミキシングボールに入れ、均一なライトブルーの色調になるまで十分に連和します。連和後細く意図を引くような状態を保ちながらフラスコに注入します。パラタルアーチの三箇所穴まで十分にシリコーン印象材を満たしておくと、フラスコと印象が維持されます。
- （5）本材は室温（2 3℃）で焼く 3 0 分後に硬化します。硬化後、エアーガンを利用しながらベースを外し、同様にマスターモデルを取り外します。
- （6）耐火模型材を注入する前に、印象面を表面活性剤「ワクシット」で処理し、余剰分を除去して十分に乾燥させます。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1、除菌剤などの塩素系材料は硬化を阻害するので、混入が著しく遅延する可能性があるので注意すること。
- 2、1 0℃以下の低温条件では、硬化が著しく遅延する可能性があるので注意すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- （1）本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、直接触れないようにすること。また、使用により過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。
- （2）本材又は練和物は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- （3）開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- （4）本材又は練和物が皮膚に付着した場合は、布又は紙などで拭きとり石鹸でよく洗浄すること。また、作業後は必ず、うがい、手洗い、洗面などを行うこと。
- （5）本材は、換気の良いところで使用すること。
- （6）他の製品と混用しないこと。

（7）本材は、記載の使用目的以外には使用しないこと。

（8）本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び使用期間等】

- （1）本材は、直接日光を避けて室温で保管すること。
- （2）本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

1 セット

- | | |
|--------|------|
| 1) ベース | 6 kg |
| ハードナー | 6 kg |

- | | |
|--------|------|
| 2) ベース | 1 kg |
| ハードナー | 1 kg |

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名：有限会社 ディーシーエルタニモト

住所：兵庫県栗市山崎町須賀沢 1283

TEL 0790-63-2788

FAX 0790-67-9090

製造元：中国

取扱説明書を必ず参照のこと