

機械器具 60 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工用トリマ 70741000

GDS 簡易ミリングマシン

【禁忌・禁止】

- ・ 熟知したもの以外は、使用しない事。
- ・ 使用目的以外での目的で使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

・ コントロール部
定格電圧：AC100V 50/60Hz
消費電力：100W
回転数：0 ～ 45,000 rpm
外形寸法：W141×D186×H97mm
重量：1.6kg
・ サーバイヤー部
外形寸法：L175×D169×H257mm
重量：4.9kg

[本体の構成写真]



【使用目的、効能又は効果】

本品は、歯科技工における切削研磨作業に用いる機器である。
電動モータで駆動する研削ドリル（ハンドピース）を備え、それを保持するサーバイヤーを手動で位置決めして、切削・研磨作業を行う。

【性能及び安全性に関する規格】

外観：正しい輪郭を持ち、サビ、歪み、汚染、その他欠陥があつてはならない。

作動：電源に接続し、スイッチを ON および OFF することにより、ドリルが異常なく回転作動および停止作動をすること。加えて、サーバイヤーのアーム等がスムーズに可動し、また固定できること。

【操作方法又は使用方法等】

- (1) AC100V 電源と接続する。
- (2) コントロールユニットのボリュームを MIN に設定する。
- (3) POWER スwitch を ON に入れ、LED ライトが点灯することを確認する。
- (4) 可動のスイッチをフットコントロールかハンドコントロールに設定する。

●フットコントロールの場合

- 1) コントロールユニットの Hand ボタンを OFF にする。
- 2) ボリュームを望ましい回転数に設定する。
- 3) フットスイッチを踏む。

●ハンドコントロールの場合

- 1) コントロールユニットの Hand ボタンを ON にする。
- 2) ボリュームを望ましい回転数に設定する。
- (5) 回転方向の変更
正逆回転方向ボタンにより回転方向を設定する。

【使用上の注意】

- (1) 装置を正しく設置すること。
- (2) 修理専門業者以外は本装置を修理、分解、再組み立て等行わないこと。
- (3) 作業時は、粉塵による人体への影響を避けるため、防塵マスク・保護メガネを使用し、適切な防塵措置を行うこと。
- (4) 切削工具は曲がったり、加工した物、錆びているものは使用しないこと。
- (5) 切削工具の表示使用回転数以下で使用する。
- (6) ハンドピースの清掃にエアの吹付は行わないこと。
- (7) 各部の清掃・メンテナンスを行うときは、電源スイッチを切り、電源コードプラグをコンセントから抜いていくこと。
- (8) チェックは小まめに取り外して清掃すること。（チェック内にゴミが溜まり、チェック力が落ちて危険なため）
- (9) モーター回転中はチェック開閉につながらず操作をしないこと。
- (10) 長期に使用しない時は電源プラグを抜いておくこと。
- (11) 異常な音、臭い、煙等があった場合は、すぐに電源プラグを抜くこと。
- (12) 定格電圧のもとで使用すること。

【保管方法及び有効期限】

- (1) 水のかからない場所に保管すること。
- (2) 気圧・気温・湿度・風通し・日光・ほこり・塩分・硫黄分を含んだ空気等により、悪影響を生ずる恐れのある場所での保管は行わないこと。
- (3) 傾斜・振動・衝撃の心配のない場所に保管すること。

【包装内訳】

本体 1 台/箱

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

：有限会社 ディーシーエルタニモト
住所 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢 1283
TEL 0790-63-2788 FAX 0790-67-9090

製造業者

：有限会社 ディーシーエルタニモト
：SAEYANG CO. LTD. KOREA

取扱説明書を必ず参照のこと