

2024 年 11 月 6 日作成（様式第 1 版）

製造販売届出番号：28B2X10028000138

機械器具 60 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 34713000

P P D S 3D スキャナー UP560

【禁忌・禁止】

- 本品を歯科補綴物の製作以外の目的で使用しない事。
- 専門員以外が分解、修理等は行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 外観（本体）



2. 寸法／重量（本体）

- 幅 285 mm × 奥行 300 mm × 高さ 556 mm
- 重量 10 kg

3. 使用リソース

- 電源：単相 100V-240V 50/60Hz

4. 動作原理

本機に内蔵された光学的スキャナーで、ステージ上の歯型模型をスキャニングし、模型の表面形状を取得・計算し画像データとしてパソコンへ転送し、専用ソフトで歯科修復物の設計を行う。

【使用目的又は効果】

本品は、ソフトウェアを利用して光学的に歯型模型をスキャニングし、歯科修復物の設計のための画像データを生成するための装置である。本品を技工室内に設置して、歯科修復物のコンピュータ支援設計（CAD）に用いる。

【使用方法】

- パソコンに専用ソフトをインストールし、スキャナーとパソコンを USB ケーブルで繋ぐ。
- スキャナーの電源を入れて、パソコンの専用ソフトを起動する。
- 歯型模型をスキャナーの測定テーブルにセットする。
- パソコンを操作しスキャンを実行する。
- スキャン結果として得られたデータを元に、歯科修復模型をパソコン上にて設計する。

【使用上の注意】

- スキャンに悪影響を及ぼす恐れのある環境（ほこり、日光、温度、湿度、塩分等）での使用は避けること。
- 水や液体のかからない場所で使用すること。
- 振動や衝撃の発生しない水平な場所で使用すること。
- 異音や動作異常が発生した場合は使用を中止すること。
- 歯科医療関係者以外は使用しないこと。

【保管方法及び使用期間等】

〔保管方法〕

- 通気性の良い、水や薬品汚染のない場所に保管する。
- 振動や衝撃のない安定した場所に保管する。

〔耐用期間〕

4年。但し日々の清掃等の状況により変化する。

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名：有限会社 ディーシーエルタニモト

住所：兵庫県宍粟市山崎町須賀沢 1283

TEL 0790-63-2788

FAX 0790-67-9090

製造業者名：Shanghai Pigeon Dental Mfg. Co., Ltd （中国）

取扱説明書を必ず参照のこと