

機械器具 (32) 医療用吸引器
一般医療機器 再使用可能な汎用吸引チップ (JMDN コード 38749000)

吸引チップ入り口


【禁忌】

使用方法

- ・ 本品は、鼻孔内の分泌物と粘液（鼻水）を取り除き清浄にするための専用器です。これ以外の目的に使用しないこと。
- ・ 併用する吸引器の添付文書および取扱説明書を使用前に読んでおくこと。
- ・ 本品の使用（再使用する場合も）には高圧蒸気滅菌又は煮沸消毒をすること。【交差感染防止のため】
- ・ エチレンオキシドガス滅菌しないこと。【残留 EOG ガスにより、人体に影響を及ぼす恐れがある】
- ・ 本品を乳幼児の手に届くところに置かないこと。【誤って飲み込む恐れがある】

【形状・構造及び原理等】

1. 外観・形状

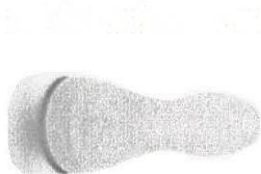

2. 寸法 (mm)

外形寸法: 32 (L) × Φ5.00 (吸引先端口)
× 9.80 (吸引先端口側膨らみ) × Φ15.29 (吸引器接続側)

3. 原材料

シリコーンゴム

【使用目的、効能又は効果】

手術又は治療時に吸引器具に接続し、吸引を調節又は指示する器具をいう。本品は汎用吸引チップで、再使用可能である。

【品目仕様等】

耐熱性: 135℃以下

【操作方法又は使用方法】

- 1) 本品は未滅菌なので、使用前に高圧蒸気滅菌 (121℃ 20 分) 又は煮沸消毒をする。また、再使用する場合も同様の処置をする。
- 2) 本品の漏斗の広がった面側に吸引器の吸引口を差込む。
- 3) 本品の突起状の開口部を患者の鼻孔にあて、吸引器を作動させる。
(吸引力により、鼻孔内の液状または半固形物を

吸引器に吸い取る)

【使用上の注意】

1. 本品の表面を確認して、汚れ、亀裂がある場合は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・ 使用環境条件
温度範囲: 15 ~ 35℃
湿度範囲: 0 ~ 85 %RH
- ・ 保存及び輸送環境
温度範囲: -20 ~ +50℃
湿度範囲: 0 ~ 85 %RH
- ・ 耐用年数: 4 年

【保守・点検に係る事項】

1. 清掃及び消毒
 - ① 本品を使用前には、水道水で洗浄してから高圧蒸気滅菌 (121℃ 20 分) 又は煮沸消毒をして下さい。
 - ② 本品の使用後は、水道水で洗浄して下さい。

【包装】

1 個単位で包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

■ 製造販売業者

株式会社 TR アンド K

〒162-0065 東京都新宿区住吉町 1-17

シルバープラザ市ヶ谷 30B 号室

TEL: 03-6457-8751 FAX: 03-6457-8752

■ 製造業者

AVITA Corporation (台湾)

■ 製造業者

東神倉庫 株式会社

〒140-0012 東京都品川区勝島 1-5-21

TEL: 03-3766-5126 FAX: 03-3764-6609