

* 機械器具 (32) 医療用吸引器

* 一般医療機器 再使用可能な汎用吸引チップ（38749000）

吸引チップセット

【警告】


- 初めての使用や長期間保管後の使用のときは、使用前に清掃・消毒をすること。[交差感染]
- 使用後は、使用品を清掃・消毒をすること。[交差感染]

【禁忌・禁止】

- 併用禁忌
- 本品に取り付ける吸引器は、以下の製品以外を使用しないこと。
- 販売名：ELENOA エレノア
 - 一般的名称：電動式可搬型吸引器
 - 認証番号：227AKBZX00011000
 - 製造販売業者：株式会社 T R アンド K

【形状・構造及び原理】

1. 外観図・寸法（mm）

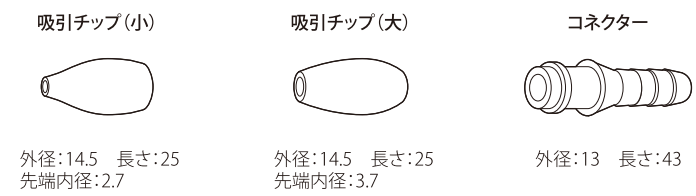

- **2. 構成
- 下記の構成から選択できる。

(1) 吸引チップセット（小）		(2) 吸引チップセット（大）	
名称	個数	名称	個数
吸引チップ（小）	2	吸引チップ（大）	2
コネクター	2	コネクター	2

3. 原材料
- 吸引チップ：シリコンゴム
- コネクター：ポリカーボネート樹脂

【使用目的又は効果】

手術又は治療時に吸引器具に接続し、吸引を調節又は指示する器具をいう。
本品は汎用吸引チップで、再使用可能である。

【使用方法】

1. 吸引ボトルに接続された、吸引ホースの先端に装着し、患者の鼻腔から鼻水等の体液を吸引ボトルに吸引する。
- **2. 使用前準備
- 吸引ホースの先端に、コネクター、吸引チップを取り付ける。
 - 吸引ホースの片端を本体のホース接続口へ接続する。
 - 吸引器の吸引圧調整ツマミを回し、圧力計が必要な圧力となるように調整する。
 - 吸引器本体の電源を入れる。
 - 別に用意した清潔な浄水又は精製水などに吸引チップ先端を入れ、吸引チップを濡らす。
3. 吸引
- (1)吸引チップの先端を患者の鼻腔に挿入し、鼻水等の体液を吸引する。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
 - 併用医療機器：ELENOA エレノアの添付文書も併せて参照すること。
 - 本書に記載されている以外の方法で使用しないこと。[予測できない動作をする恐れがある]

【保管方法及び有効期間】

- 水のかからない場所、高温・多湿でない場所。
- 直射日光、ほこり、塩分、硫黄分などの化学薬品を含んだ空気・ガスなどにより悪影響の生じる恐れのない場所。
- 洗浄・消毒した構成品は、十分な水洗と速やかな乾燥をさせてから保管すること。
- 振動・衝撃などのない場所。

【保守・点検に係る事項】

- 使用者による保守点検事項
- 割れ、ひび、バリや突起物の怪我のもとになる欠点の有無を確認する。
 - 汚れ、傷の有無や使用頻度に応じ、適切に交換する。

清掃・消毒

構成品	清掃	消毒
吸引チップ（小）	浄水で希釈した中性洗剤を含ませ拭く	次亜塩素酸ナトリウムを含ませ拭く
吸引チップ（大）	浄水で希釈した中性洗剤を含ませ拭く	次亜塩素酸ナトリウムを含ませ拭く
コネクター	浄水で希釈した中性洗剤を含ませ拭く	次亜塩素酸ナトリウムを含ませ拭く

*※本体を滅菌しないこと。[高温・ガス・液体により故障の恐れ]

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等

*製造販売業者：株式会社 T R アンド K
住 所 ：東京都新宿区四谷 2-9 NK 第 7 ビル
TEL / FAX ：03-6457-8751 / 03-6457-8752