

機械器具 (32) 医療用吸引器
一般医療機器 再使用可能な汎用吸引チップ (JMDN コード 38749000)

吸引ノズル (しっかりノズル)

【禁忌・禁止】

使用方法

- ・本品は、鼻孔内の分泌物と粘液 (鼻水) を取り除き清浄にするための専用器です。これ以外の目的に使用しないでください。[性能が発揮されないことがある]
- ・併用する吸引器の添付文書および取扱説明書を使用前に読んでください。[正しく使用できないことがある]
- ・本品の使用前 (再使用する場合も) には洗浄し、消毒または除菌してから使用してください。[交差感染防止のため]
- ・本品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。[誤って飲み込む恐れがある]

【使用上の注意】

1. 本品の表面を確認して、汚れ、亀裂がある場合は使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・使用環境条件
周囲温度: +16 ~ +35 °C
- ・保管環境条件
周囲温度: -25 ~ +55 °C
相対湿度: 0 ~ 85 %

【形状・構造及び原理等】

1. 外観・形状



2. 寸法 (mm)

外形寸法: 32 (L) × Φ5 (吸引先端)
× Φ16 (吸引器接続側)

3. 原材料

シリコーンゴム

【保守・点検に係る事項】

1. 清掃及び消毒
 - ① 本品を使用前には、洗浄し、消毒または除菌してから使用してください。
 - ② 本品の使用後は、水道水で洗浄してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■ 製造販売業者

株式会社 TR アンド K

* 〒160-0004 東京都新宿区四谷 2-9

NK 第 7 ビル

TEL: 03-6457-8751 FAX: 03-6457-8752

■ 製造業者

アビタコーポレーション

AVITA (WUJIANG) Co., LTD

中華人民共和国: CHINA

■ 発売元

コンビ株式会社

コンシューマープラザ (Customer Service Center)

住所: 〒339-0025

埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田 271

TEL: 048-797-1000 FAX: 048-798-6109

受付時間: 9:30~17:00

(日祝日、年末年始を除く)

【使用目的又は効果】

手術又は治療時に吸引器具に接続し、吸引を調節又は指示する器具をいう。本品は汎用吸引チップで、再使用可能である。

【使用方法等】

- 1) 本品は未滅菌なので、使用前に洗浄し、消毒または除菌してから使用してください。また、再使用する場合も同様の処置をしてください。
- 2) 本品の漏斗の広がった面側に吸引器コネクタの吸引口を差込む。
- 3) 本品の突起状の開口部を患者の鼻孔にあて、吸引器を作動させる。
(吸引力により、鼻孔内の液状または半固形物を吸引器に吸い取る)