

機械器具 32 医療用吸引器

一般医療機器：再使用可能な汎用吸引チップ（JMDNコード：38749000）

電動鼻吸い器 替えノズル&パッキンセット

【警告】


- 本品を乳幼児及び子供の手の届くところに置かないでください。
[誤って飲み込むおそれがあります]
- 誤飲した場合は直ちに医師に相談してください。
- お子さまに鼻の病気がある場合には使用する前に医師に相談してください。
- 使用中に出血したりお子さまが痛がる場合には直ぐに使用をやめ、直ちに医師に相談してください。[鼻孔内の粘膜を痛めたり鼻腔炎をおこします]
- 複数のかたが使用する場合は、その都度吸引ノズルを新しいものと交換するか、洗浄し、消毒または除菌してから使用してください。
[感染の危険があります]

【禁忌・禁止】

- ＜使用方法＞
本書に記載されている使用目的以外で使用しないでください。
- ＜併用医療機器＞
- 1) MRI 検査を行う際は本品を検査室に持ち込まないこと。
[MR 装置への吸着や、火傷等のおそれがあります。]
 - 2) 高圧酸素治療装置に本品を持ち込まないこと。
[誤作動や破損、爆発のおそれがあります。]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観・形状・原材料

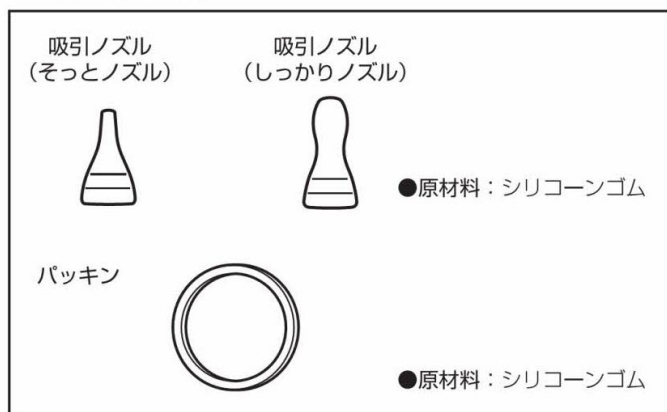

【使用目的又は効果】


吸引器具に接続し、吸引を支持する器具である。本品は汎用吸引ノズルで再使用可能である。

【使用方法等】

1. 使用準備

- 1) 本品は未滅菌なので、使用前に洗浄し、消毒または除菌してから使用してください。
- 2) 吸引ノズルの漏斗の広がった面側を吸引器コレクタの吸引口に差し込む。
- 3) 吸引ノズルの突起状の開口部を患者の鼻孔にあて、吸引器を作動させる。
(吸引力により、鼻孔内の液状または半固形物を吸引器に吸い取る)

- 4) パッキンは、吸引器のコレクタの取付箇所に異物を挟まないでよいれないように取り付けてください。

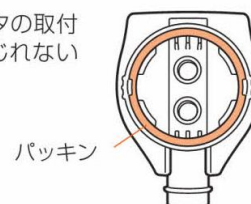

2. 吸引

- 1) 吸引器本体の電源ボタンを押したまま鼻孔内の分泌物及び粘液を吸引する。[パッキンが変形して装着されると正常な吸引力が得られません]
- 2) そっとノズルとしっかりノズルの使い分けかた
そっとノズル：鼻孔から出てきた粘液を吸引
しっかりノズル：鼻孔内に溜まった粘液を吸引

3. 組み合わせて使用可能な医療機器

本セットは 電動鼻吸い器、電動鼻吸い器 C-62
認証番号：228AFBZX00140000 にのみ使用できる。

【使用上の注意】

- 電動鼻吸い器本体の添付文書を併せて参照すること。
- 本書で記載された以外の方法で使用しないこと。
[予期できない動作をするおそれがあります]

【保管方法及び有効期間等】

- 水のかからない場所、悪影響の生じるおそれがない場所に保管してください。
- 洗浄・消毒した構成品は十分な水洗いと速やかな乾燥をしてから保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- 電動鼻吸い器本体の「取扱説明書」をよく読み理解したうえで、正しく安全に洗浄・消毒してください。

部品名	消毒・除菌方法		
	煮沸	電子レンジ	薬液
そっとノズル	○	○	○
しっかりノズル	○	○	○
パッキン	×	×	×

【包装】

吸引ノズル.....各 1 個
パッキン.....2 個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 TR アンド K
〒160-0004 東京都新宿区四谷 2-9 NK 第 7 ビル 501
TEL：03-6457-8751

製造業者：アビタ コーポレーション
AVITA (WUJIANG) Co., Ltd.
中華人民共和国：CHINA

発売元：コンビ株式会社
コンシューマープラザ (Customer Service Center)
住所：〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田 271
TEL：048-797-1000 FAX：048-798-6109
受付時間：9:30 ～ 17:00 (日祝日、年末年始を除く)