

機械器具(32)医療用吸引器
一般医療機器
再使用可能な汎用吸引チップ
(JMDNコード:38749000)

電動鼻水吸引器 吸引ノズル&パッキンセット

【禁忌・禁止】

- ・ご使用前に、本書及び取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- ・本書に記載されている使用目的以外で使用しないでください。
- ・初めての使用、または長期間保管後にご使用になる場合は、吸引器洗浄可能部品を洗浄してからご使用してください。
- ・ご使用の際は3秒～5秒を目安に吸引してください。
- ・お子様に鼻の病気がある場合には使用する前に医師に相談してください。
- ・使用中に出血や、お子様が痛がる場合には直ちに使用をやめてください。(鼻孔内の粘膜を痛めたり鼻腔炎をおこす恐れがあります。)
- ・複数の方が使用する場合はその都度吸引ノズルを新しいものと交換するか、洗浄・消毒、または除菌してから使用してください。(感染の危険があります。)
- ・ご使用後は必ず取扱説明書に従って洗浄し、乾燥させた上で、清潔な場所に保管してください。
- ・乳児の手の届かないところに保管してください。(シリコンチップを誤飲する恐れがあります。)
- ・分解、修理、改造などを行わないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・寸法

すみずみ
吸引ノズル



パワフル
吸引ノズル



パッキン



原材料:シリコンゴム


【使用目的又は効果】

吸引器具に接続し、吸引を指示する器具である。本品は汎用吸引ノズルで、再使用可能である。


【使用方法等】

1. 使用準備


- ①本品は未滅菌なので、使用前に洗浄し、消毒または除菌してから使用してください。
- ②吸引ノズルの漏斗の広がった面側を吸引器コレクタの吸引口に差込む。

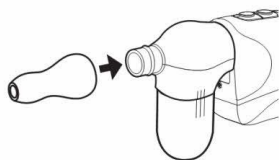

- ③吸引ノズルの突起状の開口部を患者の鼻孔にあて、吸引器を作動させる。

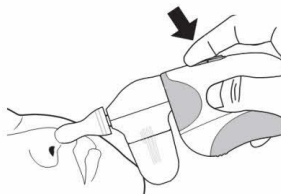

- ④パッキンは、吸引器のコレクタの取付箇所に異物を挟まないでよいように取り付けてください。

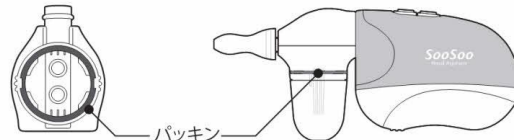

2. 吸引

- ①吸引器本体の電源ボタンを押したまま鼻孔内の分泌物及び粘液を吸引する。(パッキンが変形して装着されると正常な吸引力が得られません。)
- ②すみずみ吸引ノズルとパワフル吸引ノズルの使い分け方
すみずみ吸引ノズル:鼻孔から出てきた粘液を吸引
パワフル吸引ノズル:鼻孔内に溜まった粘液を吸引

3. 電動鼻水吸引器SS-19に組み合わせ使用可能です。

【使用上の注意】

- ・電動鼻水吸引器の添付文書を併せて参照すること。
- ・本書で記載された以外の方法で使用しないこと。(予期できない動作をするおそれがあります。)

【保管方法及び有効期間等】

- ・水のかからない場所、悪影響の生じる恐れがない場所に保管してください。
- ・洗浄・消毒した構成品は十分な水洗いと速やかな乾燥をしてから保管してください。

【保守・点検に係る事項】

「取扱説明書」をよく読み理解したうえで、正しく安全に洗浄・消毒してください。

部品名	消毒滅菌方法		
	煮沸	電子レンジ	薬液
すみずみ吸引ノズル	○	○	○
パワフル吸引ノズル	○	○	○
パッキン	×	×	×

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■ 製造販売業者
株式会社 TRアンドK
〒160-0004 東京都新宿区四谷2-9NK第7ビル 5F

■ 製造元
AVITA (WUJIANG) Co., Ltd
中華人民共和国 CHINA

必ず取扱説明書をご参照ください