

2017年5月15日作成（第1版）

2021年9月29日作成（第2版）


医療機器届出番号 23B3X10013000004

歯科材料(09) 歯科用研削材料
 一般医療機器 歯科用研削器材 70908000

DD エクストラファインエンドミル

【形状、構造及び原理】

形状、構造

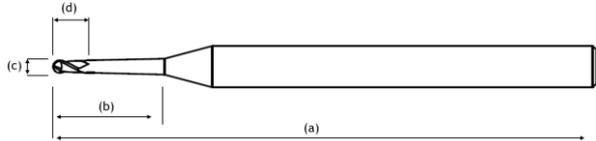

形式	全長(a)	首下長(b)	刃径(c)	刃長(d)
DDEX-R1.0	50.0	12.0	2.0	3.0
DDEX-R0.5	50.0	10.0	1.0	1.5
DDEX-R0.3	50.0	10.0	0.6	0.5

(単位: mm)

【使用目的、効能又は効果】

専用の加工機に取り付け、歯科用 CAD/CAM 材料を切削・研削加工するために用いる。

【操作方法又は使用方法】

1. 本品を加工機に取り付け、緩みなどが無いことを確認する。
2. 歯科用切削加工材料を研削する。

※詳細な使用方法については、加工機及び CAM 用ソフトウェアの取扱説明書を参照する。

【使用上の注意】

1. 歯科従事者以外は使用しないこと。
2. 使用前に、ひび、破損、変形がないか確認すること。
3. 加工機の取扱説明書に従い、本品を確実に装着すること。
4. 予備運転を行い、異常がないか確認した後、加工すること。
5. 本品は刃物であるため、取り扱いには十分注意すること。
6. 【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 高温、多湿の場所は避け、ケースに入れて保管する。
2. 歯科従事者以外が手を触れないように適切に保管・管理する。

【保守点検に関する事項】

1. 金属製のブラシ等で清掃しないこと。
2. 水分を含んだ布等で清掃しないこと。
3. 工業用工具に用いられるオイル等は、加工する歯科用修復物に付着するおそれがあるため、塗布しないこと。

【包装】

1本/ケース

【製造販売業者及び製造者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者:株式会社データ・デザイン
 住所:愛知県名古屋市中区錦三丁目4番6号
 桜通大津第一生命ビルディング 12F
 電話番号:052-953-1588

製造業者:オーエスジー株式会社