

プリマ スプリント


再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止
2. 医療目的以外の使用禁止
3. 25℃以上の水は使用しないこと
(水温が高いと相乗的に硬化時に発熱し低温やけどの恐れがあるため。)
4. 本品目の「折り返し」、「折り畳み」施術の禁止

【形状・構造及び原理等】

<断面図>

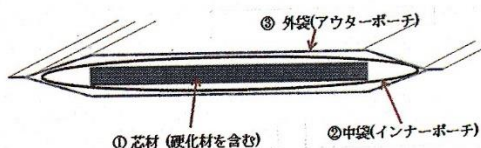

<平面図>

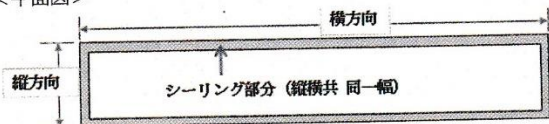

<寸法>

縦方向の長さ: 1 インチから6 インチまで6種
横方向の長さ: 25 センチから450 センチメートルまで13種

<各部の機能及び動作>

① 芯材

不織布とグラスファイバーの2種類がある。
芯材に樹脂が浸み込ませてあり、水に浸して疾患部位に沿って当てがえれば時間の経過と共に硬化し、固まる。

② 中袋 (インナーポーチ)

芯材を包み込んでいる不織布の袋状のものであり、肌に直接接触するものである。

③ 外袋 (アウターポーチ)

芯材の入った不織布の中袋(インナーポーチ)を外気と接触しない様に密閉し、スプリント(副木)を長時間保管出来る様にしているアルミニウム製の袋である。

(注) 芯材の入った中袋(インナーポーチ)の総称を「スプリント」と言う。

<原理>

本品は、不織布又はグラスファイバーの芯材に含浸している樹脂が水と反応して硬化し、疾患部を保持し保護する。

【使用目的、効能又は効果】

本品は、身体の骨折、疾患のある又は疼痛のある捻挫等の損傷部位を固定するために用いるパット入り器具である。この目的に沿って損傷部位が、しっかりと固定され、疾患部に余分な負担を掛けることが無くなり、損傷部位の回復に必要な役割を果たす。

【操作方法又は使用方法等】

(施術準備)

- ① あらかじめ、20℃前後の水を適当な大きさの容器に溜めておくこと。
- ② 外袋(アウターポーチ)から中袋(インナーポーチ)を取り出すときからゴム手袋を着用すること。
- ③ 使用前の袋の上からスプリントが柔らかいことを確認し、硬くなっている場合は使用しないこと。

(プリカットのタイプ)

- ① 疾患部の大きさと部位の状態に合わせて縦横共に適切な長さのスプリントを選ぶ。

- ② アルミニウム製の外袋(アウターポーチ)の切り取り易い場所をハサミで切るか、引き裂いて中のスプリントを取り出す。
- ③ 取り出したスプリントを一度に全体が浸せる位の量の予め貯めていた20℃前後の水に十分に浸す。この時、スプリント全体に隅々まで水がしみ渡るようにする。
- ④ スプリント全体に水が浸み込んだことを確認した後、タオルなどを用いて余分な水を取り除く。
スプリントの片方の端を切り開き、噴霧器で適当な水分を吹き付けて、水を浸み込ませてよい。
- ⑤ スプリントを疾患部にあてがう。
- ⑥ スプリントの上に、包帯で疾患部の形状に合わせて巻き付ける。
- ⑦ 室内環境により7分から10分間で硬化するので、巻き付けたままの状態での硬化を待つ。

(ロールタイプのタイプの場合)

- ① 疾患部の幅に合うようなスプリントを選ぶ。
- ② 疾患部の大きさと部位の状態に合わせて、外袋(アウターポーチ)と共にその中のスプリントを適切な長さにハサミで切り落とす。
- ③ 切り落としたアルミニウム製の外袋(アウターポーチ)からスプリントをそのまま取り出す。
- ④ 残りのスプリントが外に出ない様に、外袋(アウターポーチ)の内側に少し押し込む。
- ⑤ 中に押し込んだ分だけ外袋(アウターポーチ)の入口に空間があるので、その部分を平らにして備え付けのクリップで外気が入り込まない様に留める。
- ⑥ この後の手順は(プリカットのタイプ)の③からの手順と同様。

【使用上の注意】

- ① 本品を装着中及び装着直後には、発熱を伴うので、患者が熱さを訴えた場合は、直ちに本品を外すこと。
- ② 本品使用中に皮膚障害と思われる症状が認められた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。
- ③ 外袋を開封した時点から直ちに硬化が始まるので直ちに使用すること。
- ④ 変形の恐れがあるため、完全硬化まで本品に余分な力を加えないこと。
- ⑤ 未開封の本品を乱暴に取り扱わないこと。外袋に穴があき、空気中の湿気により、本品が硬化し、使用できなくなることがある。
- ⑥ 芯材の樹脂が偏るので、縦横で長期間保管しないこと。
- ⑦ 本品の露出した端の部分でケガをしないように十分に注意すること。
- ⑧ 本品を廃棄する際は、行政の定めた規則に従い、適切に処理すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ① 貯蔵・保管方法
直射日光を避け、温度15℃～30℃、湿度60%以内で保管すること。
- ② 使用期間
製造日より3年(使用期限は中袋のラベルに記載)

【包装】

- ① プリカッタイプ: 1箱 10本入り、
(但し、PSW、PSF 545 及びPSW、PSF 645は1箱 5本入り)
- ② ロールタイプ: 1箱 1本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

株式会社 TCC

〒113-0033 東京都文京区本郷3-31-6

電話:03-6801-8711 (代表)

製造業者

D&B 社 (国名:韓国)