


歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス 16189000
DB CAD/CAM ワックス

【形状・構造及び原理等】

[形状]

φ98×12, 16, 20mm のディスク状

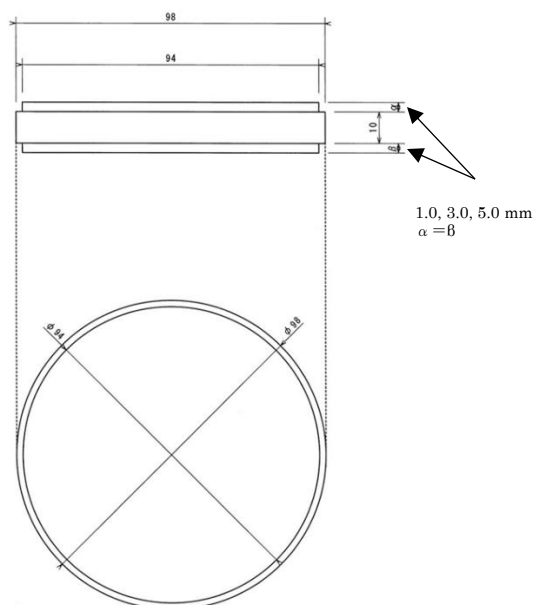

[成分]

パラフィンワックス、染料

[原理]

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットにて切削加工を行い、歯科鑄造物のろう型に用いる。

[仕様]

項目	自社標準値
焼却残さ	0.001%以下

※試験方法は JIS T 6503:2013 による。

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型製作用のキャスティングワックスである。

【使用方法等】

[本材に使用する機械]

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

[使用方法]

CAD/CAM 加工機などを用いて加工を行い、必要に応じてマージン等の調整を行い、通法に従い、鑄造を行う。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. 本材の用いられた成分又は類似成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある人などは使用しないこと。
2. 再溶解して使用しないこと。
3. 本材は可燃性であるので、使用の際はやけどをしないように注意すること。
4. 過度の加熱や、加熱したままでの放置はしないこと。
5. 本材は CAD/CAM 加工機などを用いて切削加工をし、ロウ型を作成するものであるので、本材を融解し、模型に盛り上げ、形成してロウ型を作成しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 本材は高湿、多湿、直射日光を避けて保管すること。
2. 本材の使用及び保管場所には、消火器装置を備え付けること。
3. 本材は火気厳禁の場所に保管し、ひとつの保管場所に多量に保管しないこと。
4. 本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 DentalBank

住所：福岡県大野城市御笠川 2-8-9

TEL：092-513-3280