

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストینگワックス 16189000
DB 龍キャストینگワックス 整

【形状・構造及び原理等】

[形状]

粒状のワックス

4. 25℃以下の場所で保管すること。

5. 本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[成分]

蜜蝋、パラフィンワックス

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 DentalBank

住所：福岡県大野城市御笠川 2-8-9

TEL：092-513-3280

[原理]

クラウン及びインレー等の鑄造用ろう型を作製するワックス。

[仕様]

項目	自社標準値
焼却残さ	0.001%以下

※試験方法は JIS T 6503:2013 による。

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型製作用のキャストینگワックスである。

【使用方法等】

[使用方法]

ワックスを溶解し、クラウン又はインレー等の形成をし、通法に従い埋没、鑄造を行うが、基本的に単体で使用せず、「DB 龍キャストینگワックス 棒」の硬さの調整で、各々の使用感に合わせて、「DB 龍キャストینگワックス 棒」を溶かしたワックスポットに、少量入れて使用する。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. 本材は可燃性であるので、使用の際はやけどをしないように注意すること。
2. 過度の加熱や、加熱したままでの放置はしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 本材は高湿、多湿、直射日光を避けて保管すること。
2. 本材の使用及び保管場所には、消火器装置を備え付けること。
3. 本材は火気厳禁の場所に保管し、ひとつの保管場所に多量に保管しないこと。