

機械器具 48 注射筒
一般医療機器 汎用注射筒 13929001
SANXIN シリンジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


再使用禁止・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、1. バレル、2. プランジャチップ、3. プランジャからなる。

本品の容量は、1mL である。

〈構成〉

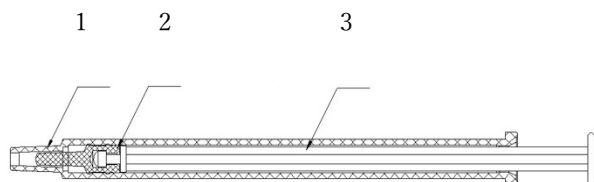

・本品は以下の原材料を使用している。

部品	原材料
プランジャ	ポリプロピレン
バレル	ポリプロピレン
プランジャチップ	ポリプロピレン
ノズル	ポリプロピレン
バレル潤滑剤	ジメチルシリコーン
ピストン	熱可塑性加硫合成ゴム

〈仕様〉

項目	性能
耐圧性	300kPa

【使用目的又は効果】

液体を注射・注入するか吸引するために用いる器具であり、多くの場合、注射針を接続して薬剤の投与又は採血に用いる。

【使用方法等】

1. 薬液注入の場合

- (1) 包装から本品を取り出し、注射針等を接続します。
- (2) プランジャを押し、バレル内部から空気を完全に押し出します。
- (3) 注射針等のキャップを外し、薬液を吸引します。
- (4) 静脈等に穿刺し、薬液を注入します。

2. 採血の場合

- (1) 包装から本品を取り出し、注射針等を接続します。
- (2) プランジャを押し、バレル内部から空気を完全に押し出します。
- (3) 注射針等のキャップを外し、静脈等に穿刺し採血します。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

1. 注射針等と接続する際は次の事項に注意すること。
 - (1) 接続部に横方向の力を加えないこと。[液漏れ、空気混入が生じるおそれがある。]
 - (2) 接続部に薬液が付着した場合は、薬液をふきとり、注射針等と接続すること。[接続部に緩みが生じる。]
 - (3) 注射針等のキャップを付けたまま接続すること。
 - (4) 緩みや外れが生じないようにしっかりと接続し、漏れ等の異常がないことを確認すること。
2. プランジャを引く際は次の事項に注意すること。
 - (1) バレル印刷部の目盛を越えて引かないこと。[プランジャがバレルから外れ、液漏れが生じるおそれがある。]
 - (2) プランジャをまっすぐゆっくり引くこと。[強く引く、ねじりながら引いた場合は、バレルとの密着性が低下し、液漏れやプランジャチップの外れが生じるおそれがある。]
3. 造影剤等の薬液を高压で注入しないこと。[破損、液漏れが生じるおそれがある。]
4. バレル部を強く握る等、圧迫するような力を加えないこと。[プランジャチップとバレルとの密着性が低下

し、液漏れ、空気混入が生じるおそれがある。]

5. バレル印刷部については次の事項に注意すること。

(1) 目盛を強くこすらないこと。[目盛が消えるおそれがある。]

(2) 薬液等が付着した状態で放置しないこと。[目盛が剥離するおそれがある。]

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 使用中は破損、接続部の緩み及び液漏れ等について確認すること。
2. 本品に衝撃を与えないこと。[破損するおそれがある。]
3. 造影剤等の高圧注入には使用しないで下さい。
4. 冷蔵保存等低温下での取扱いに注意すること。[低温下では、本品の耐衝撃性が低下する。]
5. 本製品は、塩素を含む液体で消毒しないで下さい。
6. 本製品を再使用しないこと。

〈不具合・有害事象〉

その他の不具合

空気混入、漏れ、外れ、緩み、印刷消え、破損

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水濡れに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。

〈有効期間〉

3 年 [自己認証（当社データ）による]

包装の使用期限欄を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

T.H.M アライアンス株式会社

住所：福岡県福岡市中央区天神 1 丁目 9 番 17 号

福岡天神フコク生命ビル 15 階

電話番号：092-717-3789

〈製造業者〉

Jiangxi Sanxin Medtec Co., LTD

(江西三信医療科学技術株式会社)

国名： 中国