

添付文書


届出番号: 27B3X00293000001

機械器具 24 知覚検査又は運動機能検査用器具
一般医療機器 角度計 JMDNコード 37529000

カチカチゴニオメーター

【形状・構造及び原理等】

・形状、構造

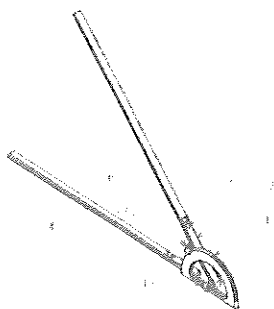

正面図

・本製品各部の名称

表-1 図の番号及び名称

図の番号	名称
①	アームA
②	アームB
③	支点軸
④	バー300
⑤	ヘッドスクリュー
⑥	※ボールプランジャー
⑦	ナット

・原材料

アルミニウム、ステンレス鋼 ※他

【使用目的又は効果】

本品はX線又は手術時等に骨の角度を測定するため
に用いる器具をいう。通常、分度器として知られている。

【使用方法等】

1. 外箱を開いて、製品を取り出す。
2. 使用前に必要なに応じて、清拭にて消毒する。
3. 測定に際して、アームAの目盛が見えるように、バーを人体にあてがう。
4. バー300を水平にし、基準線からのアームBの角度を読み取る。

【使用上の注意】

・使用目的以外に使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し、消毒する。
- 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱方法を守る。中性洗剤を推奨する。
- 3) 超音波洗浄装置などの洗浄装置で洗浄する場合、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納して処理する。
- 4) 金属タワシ・クレンザー（磨き粉）等は、器具表面を損傷するので使用を避ける。
- 5) 仕上げすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。
- 6) 使用前に汚れ・破損・可動部の動き等を点検する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社 テクノライジング
大阪府堺市北区野瀬町 61-5
電話：072-250-8879

製造業者：株式会社 テクノライジング
大阪府堺市北区野瀬町 61-5
電話：072-250-8879