

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 (70904000)

LUNOS プロフィーペースト

【禁忌・禁止】

- 本品に含まれる成分に対して、発疹・皮膚炎等の過敏症状を起こした患者には使用しないこと。
- リモネン（オレンジに含まれる）やペパーミントオイル（ミントに含まれる）にアレルギー反応を起こしやすい患者にはニュートラルを使用すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

性状：ペースト

2. 種類・成分

(1) LUNOS プロフィーペースト 2 in 1

種類（色）	成分
ニュートラル（白）	ケイ酸塩、グリセリン、蒸留水、ハイドロキシapatite、pH 調整剤、防腐剤（フェノキシエタノール、パラベン）、増粘剤、乳化剤、着色料
オレンジ（黄）	ケイ酸塩、グリセリン、蒸留水、ハイドロキシapatite、pH 調整剤、防腐剤（フェノキシエタノール、パラベン）、増粘剤、乳化剤、着色料、オレンジ香料（リモネンを含む）
ミント（青）	ケイ酸塩、グリセリン、蒸留水、ハイドロキシapatite、pH 調整剤、防腐剤（フェノキシエタノール、パラベン）、増粘剤、乳化剤、フッ化ナトリウム（1,500ppm）、着色料、ペパーミントオイル

(2) LUNOS プロフィーペースト スーパーソフト

種類（色）	成分
ニュートラル（白）	ハイドロキシapatite、グリセリン、蒸留水、増粘剤、防腐剤（フェノキシエタノール、PHB エステル）、乳化剤
オレンジ（黄）	ハイドロキシapatite、グリセリン、蒸留水、増粘剤、防腐剤（フェノキシエタノール、PHB エステル）、乳化剤、オレンジ香料（リモネンを含む）、着色料

【使用目的又は効果】

歯科医師、歯科衛生士が歯面の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 予防治療ブラシ又は歯磨カップに本品を適量取る。
- 歯科用駆動装置を用いて、適切な回転数にて歯面を清掃・研磨する。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 用いる予防治療ブラシ・歯磨カップは、指定回転数を超えての使用は行わないこと。〔歯面での発熱やペーストが飛散する恐れがある〕
- 歯面と予防治療ブラシ又は歯磨カップの間に十分な量のペーストがあることを確認して使用すること。〔歯面で発熱する恐れがある〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 本品の使用により、発疹・皮膚炎等の過敏症状を起こした患者及び医療従事者は、速やかに使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 本品が目に入った場合は、多量の水ですみやかに洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けること。
- 飲み込まないこと。
- 施術の際は施術者と患者共に、保護メガネ及びマスクなどの適切な PPE（個人保護具）をつけること。
- 本品は、歯科医療の有資格者以外は使用しないこと。
- 2in1 ミントを使用した場合、施術当日はその他のフッ化物含有製品を使用しないこと。
- 蛍光ベースのう蝕診断装置を使用する前は、2in1 ミントは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 直射日光の当たらない風通しのいい場所で、以下の温度で保管すること。
 - 温度：0℃～25℃
- 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- 使用後は、チューブの蓋をしつかり閉めて保管すること。

2. 有効期間

容器及び包装箱の表示ラベルに記載。

※砂時計マーク後の数字

例) 2024-12 は 2024 年 12 月を示す

〔自己認証（外国製造業者データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デュールデンタルジャパン株式会社

住所：〒650-0047

兵庫県神戸市中央区港島南町 6 丁目 5 番 8 号

許可番号：28B2X10034

e-mail：support@duerr.co.jp

製造元：Orochemie GmbH + Co. KG（ドイツ）

取扱説明書を必ずご参照ください。