

医療用品 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋（JMDN コード: 70976000）

ニトリル手袋

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

左右兼用、パウダーフリー、エンボス加工の未滅菌の使い捨てタイプの検査・検診用手袋である。

原材料：ニトリルゴム

【使用目的又は効果】

本品は、手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

1. 取り出し口より本品を丁寧に取り出し、着用する。
2. 使用後、感染症に注意し、院内の手順に従い適切に処理する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 複数の患者に使用しないこと。同一患者のみに使用し、再使用しないこと。
 - 2) アレルギー反応や体質等により、かゆみ・かぶれ・発疹等を引き起こすことがあります。異常を感じたら使用を中断し、医師に相談すること。
 - 3) 高濃度の薬品や溶剤（ガソリン・ベンジン類）には、使用しないでください。
 - 4) 爪先や鋭利なもの等で傷をつけないようにしてください。
 - 5) 感電のおそれがあるため、電気作業等には使用しないでください。
2. 有害事象
 - 1) その他の有害事象
かゆみ、かぶれ等のアレルギー反応

【保管方法及び使用期間等】

1. 保管方法
直射日光のあたる場所に保管せず、5℃～35℃の範囲内の場所に保管してください。また、湿度が 80%以下の場所に保管してください。
2. 有効期間
本品の使用期限は包装に記載。[自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者：TML株式会社

電話番号：052-756-3117

製造業者：Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.

中国