

機械器具(74) 医薬品注入器
一般医療機器 採液針 (JMDNコード：70324000)

Conamon吸引ニードル

再使用禁止


SC-CPVP-02

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
本品はコネクタ、針管及びプロテクタからなる。
<全体構造図>

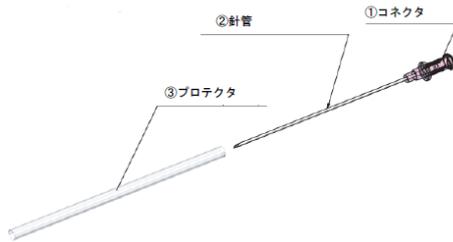

2. 材質

① コネクタ	ポリスチレン
② 針管	ステンレス鋼
③ プロテクタ	低密度ポリエチレン

【使用目的又は効果】

本品は、シリンジ等の末端コネクタに取り付けて薬液容器等から薬液を採取するために用いる採液針である。

【使用方法等】

1. 本品の包装が密封されていることを確認する。
2. 包装を開封し、本品を包装内から取り出す。
3. Conamon PVP キット (医療機器承認番号 30500BZX00002000) のハイドロリック・ガンのコネクタに確実に接続する。
4. プロテクタを真っ直ぐ引いて外した後、生理食塩水の容器の中から生理食塩水を採取する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 本品のコネクタは、Conamon PVP キット (医療機器承認番号 30500BZX00002000) のハイドロリック・ガンのコネクタ対応のため、適合しない製品と接続しないでください。
2. 誤って手指等に針を刺さないよう取扱いには十分注意してください。
3. コネクタに過剰な負荷をかけないでください。また、接続時はプロテクタでコネクタに過剰な回転負荷をかけないでください。[破損するおそれがある。]
4. 接続部に薬液等を付着させないでください。[接続部の緩み等が発生するおそれがある。]
5. リキャップしないでください。[リキャップ自体に誤穿孔のおそれがあり、また、誤って斜めにリキャップすることで、針先がプロテクタを貫通するおそれがある。]

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れ及び詰まり等について、十分注意すること。
2. 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強

度が低下することから取扱いには注意すること。[破損するおそれがある。]

3. 生理食塩水の吸引後は直ちに使用すること。[生理食塩水が結晶化し、内部に詰まるおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>
水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

<有効期間>
包装表示に記載の使用期限までに使用する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>
テクノロジー&リサーチジャパン株式会社

<製造業者(国名)>
Tecres S.p.A.
イタリア